

Luva para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpac



DADOS TÉCNICOS

- Confeccionada em borracha de látex natural;
- Não estéril;
- Com pó bioabsorvível;
- Ambidestra;
- Proporciona uma adequada barreira física reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais;
- Oferece alta resistência;
- Atende as normas ABNT NBR ISO 11193-1:2015, as portarias do INMETRO nº 194 de 20 de abril de 2018, nº 451 de 31 de agosto de 2012 e nº 332 de 26 de junho de 2012;
- A Luva para Procedimentos Não Cirúrgicos com Pó Descarpac é indicada para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

MODELOS CADASTRADOS

Tamanho

PP

P

M

G

INSTRUÇÕES DE USO

1. Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
2. Lavar, secar as mãos e proceder com a antisepsia das mesmas;
3. Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;

4. Calçar as luvas;
5. Descartar em local apropriado após o uso;
6. Higienizar as mãos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Ao retirar as luvas evitar tocar a parte contaminada com as mãos;
- Este produto não deve ser utilizado na manipulação de agentes agressivos, químicos ou ácidos, líquidos quentes e na presença de fogo;
- As luvas devem ser checadas quanto a presença de rasgos ou furos, antes e depois de colocadas, devendo ser trocadas caso isso ocorra;
- Caso as luvas rasguem durante o procedimento, devem ser removidas e descartadas;
- Produto não estéril;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- As luvas devem ser armazenadas em locais onde não ocorra a emissão de gás ozônio, a fim de evitar pequenos rasgos;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.

A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem

íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente identificado como resíduo infectante (grupo A1 de acordo com a RDC 306/2004) na cor branca e devidamente identificado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Hartalega SDN BHD

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330660176

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269