

INSTRUÇÕES DE USO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE

**Orientações para o uso das instruções de uso GOLGRAN em formato
não impresso:**

(conforme IN nº4, de 15/07/2012)

1. As instruções de uso das famílias Golgran estão disponibilizadas em formato não impresso e podem ser consultadas a qualquer tempo através do site Golgran (www.golgran.com.br/instrucoes);
2. Para identificar a instrução de uso do produto adquirido, o usuário deve observar no rótulo o número do **Registro ANVISA e seu respectivo nome comercial**. Com essas informações será possível identificar a instrução de uso correspondente ao seu produto;
3. As instruções de uso disponibilizadas apresentam as informações da revisão do documento e de sua data de emissão. É fundamental que o usuário consulte o rótulo do produto e observe qual a revisão da instrução de uso é correspondente ao produto fornecido;
4. O formato impresso das instruções de uso poderá ser solicitado **sem custo adicional** (inclusive de envio) pelo telefone +55 (11) 4223-6696 ou pelo e-mail sac@golgran.com.br. Na solicitação, o usuário deve informar a revisão da instrução de uso apresentada no rótulo do produto adquirido.

1. Identificação do Fabricante

Fabricante: GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA

CNPJ: 51.753.374/0001-19

Endereço: Rua Senador Vergueiro, 433 – São Caetano do Sul – SP – CEP:

09521-320

Telefone: +55 (11) 4223-6696

Website: www.golgran.com.br

Responsável Técnico: Fernando S. Domingues | CREA 0682565777

2. Identificação do Produto

Produto (Nome Comercial): INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE

Registro ANVISA: 10401319007

Código: Verificar rotulagem

Descrição: Verificar rotulagem

Validade: 10 anos

Contém 1 unidade

3. Modelos Comerciais da Família:

CALCADOR DUPLO 3120; COLOCADOR DE ELASTIC; COLOCADOR DE ELASTIC DUPLO; COLOCADOR DE ELASTIC SIMPLES; CONDENSADOR DE CANAL M/M - F/M; CONDENSADOR DE CANAL M/M - M/ML; CONDENSADOR DE CANAL M/M - PATHF; CONDENSADOR DE CANAL M/M 1-2; CONDENSADOR DE CANAL M/M 2-3; CONDENSADOR SUPRAFIL; CONDENSADOR 9091; CONDENSADOR 9092; CONDENSADOR 9093; CONDENSADOR 9094; CONDENSADOR 9095; CONDENSADOR 9096; CONDENSADOR 9097; CONDENSADOR 9098; CONDENSADOR 9099; CURETA WALLICH 32,42CM - Nº 01, 02, 03; DILATADOR DESJARDIM DUCTO BILIAR COM 3 PEÇAS; DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; DOBRADOR DE AMARRILHO (SPUTINIK) Nº1; DOBRADOR DE AMARRILHO Nº 2; ESPAÇADOR KERR 10; ESPAÇADOR KERR 7; ESPAÇADOR KERR 8; ESPAÇADOR KERR 9; ESPAÇADOR STARLIGHT 21MM; ESPAÇADOR STARLIGHT 25MM; ESPAÇADOR STARLIGHT

30MM; ESPAÇADOR STARLIGHT A30; ESPAÇADOR STARLIGHT A40; ESPAÇADOR STARLIGHT C/ CALCADOR 1; ESPÁTULA 24 CG; ESPÁTULA 6335-1 P/ SILICATO - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA 6335-1 P/ SILICATO - CG - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA ALM; ESPÁTULA C/ GOTEJADOR N 1; ESPATULA DE FREER; ESPATULA DUPLA SZ; ESPATULA DUPLA SSP; ESPATULA DUPLA 01; ESPATULA DUPLA 02; ESPATULA DUPLA 31; ESPATULA DUPLA 50; ESPATULA DUPLA 60; ESPATULA DUPLA 62; ESPATULA DUPLA 7; ESPATULA DUPLA 7 JLT; ESPATULA DUPLA 70; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM/ WARD ARREDONDADO; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM TP 2; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMORE ; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMORE 01; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMORE 02; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMORE 03; ESPATULA P/ CERÂMICA AMS; ESPATULA P/ CERÂMICA JOGO C/ 3 PEÇAS; ESPATULA P/ GESSO Nº 1, 2; ESPATULA P/ PINO INTRA DENTINÁRIO; ESPATULA RESINA MSS; ESPATULA P/ RESINA Nº 2 COM CALCADOR BOLINHA; ESPATULA P/ RESINA Nº 3 COM CALCADOR WARD ; ESPATULA P/ RESINA Nº 1 DUPLA ; ESPATULA P/ RESINA Nº 4 COM SILICATO; ESPATULA P/ RESINA Nº 6 COM CALCADOR HOLLEMBACK ; ESPATULA P/ RESINA SUPRAFIL Nº 1,2,1/2; ESPATULA REVERDIN RETA 29CM; ESPATULA REVERDIN BAIONETA 28CM; ESPATULA RESINA SD1; ESPATULA RESINA SD2; ESPATULA RESINA SD2 (DELICADA); ESPATULA RESINA SD3; ESPATULA RESINA SD4; ESPATULA ROACH; ESPATULA SIMPLES Nº 13, 22, 24, 24, 36 (INTRAFIL); ESPATULA SIMPLES Nº 24 (FLEXÍVEL); ESPATULA SOFIA; ESPATULA SOFIA (MILIMETRADA); ESPATULA SUPRAFIL Nº 1, 2, 1/2, 1/2A,; ESPATULA SUPRAFIL COM GOTEJADOR; ESPATULA SUPRAFIL COM HOLLEMBACK 6; ESPATULA SUPRAFIL COM WARD 3; ESPATULA SUPRAFIL LARGE; ESPATULA TUMENAS 1,2,3; ESPATULA TUMENAS - JOGO C/ 3 PEÇAS; ESPATULA TUFFIER 200X18X24; ESPATULA WARD 3 CG; ESTILETE BIOLIVAR 16, 18, 20CM; ESTILETE PARA ALGODÃO 15,18, 20, 25, 28CM; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 1, 2, 3, 4; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN JOGO C/ 4 PEÇAS; ESPÉCULO AURICULAR POLITZER 1, 2,3, 4; ESPÉCULO AURICULAR POLITZER JOGO C/ 4 PEÇAS; FÓRCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM; FÓRCEPS KIELLAND P/ OBSTETRÍCIA 39CM; GANCHO BRAUM 30CM; GANCHO FOMON DUPLO 16CM 2 DENTES AGUDOS; GANCHO FOMON DUPLO 16CM 1 DENTE AGUDO C/ BOLINHA; GANCHO FOMON DUPLO 16CM COM BOLINHA; GANCHO GILLES 17CM Nº 1 E 2; GANCHO GILLES 18CM Nº 1, 2 ; GANCHO GUTHRIE 16CM Nº 1, 2; GANCHO DE CASTRAÇÃO 1, 2; GANCHO DE HARTMAN 17CM; GANCHO DE JOSEPH 17CM - Nº 1; GANCHO DE

MODENHAUER 17CM; GANCHO DE ZAUFAL 17CM; HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM; HISTEROMETRO DE SIMS 27,32CM; INSTRUMENTO DE LUCAS; INSTRUMENTO PKT 01, 02, 03, 04, 05; INSTRUMENTO P/ CURATIVO; MARTELO CIRURGICO 150GRS; MARTELO DOYEN; MARTELO DE HAJEK 150GR; MARTELO DE HAJEK 250GR; MARTELO DE MEAD; MARTELO NEUFIELD; MARTELO UNIVERSAL 500GR E 750GR; MARTELO WILLIGER 250GR E 350GR; MOLDEIRA INOX LISA GIRATORIA GRANDE.; MOLDEIRA INOX LISA GIRATORIA PEQUENA.; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-1; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-2; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-3; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-4; MOLDEIRA INOX LISA JOGO C/8; MOLDEIRA INOX LISA PARCIAL DIREITA; MOLDEIRA INOX LISA PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-1; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-2; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-3; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-4; MOLDEIRA INOX PERF. GIRATORIA GR.; MOLDEIRA INOX PERF. GIRATORIA PEQ.; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-1; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-2; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-3; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-4; MOLDEIRA INOX PERF. PARCIAL DIREITA; MOLDEIRA INOX PERF. PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-1; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-2; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-3; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-4; MOLDEIRA INOX PERFURADA JOGO C/ 3,6,8 PEÇAS; MOLDEIRA INOX LISA JOGO C/ 3,6,8 PEÇAS; OSTEÓTOMO DE SUMMER COMPACTADOR 2.0,2.7,2.8,3.8,3.25,4.2MM - RETO E CURVO; OSTEÓTOMO DE SUMMER EXPANSOR 2.0,2.7,3.25,3.5,3.8,4.25MM - RETO E CURVO; OSTEÓTOMO DE SUMMER EXPANSOR E COMPACTOR - RETO E CURVO - JOGO C/ 3,4 E 5 PEÇAS; PINÇA ADSON 12,15CM - COM E SEM DENTE; PINÇA ADSON 12,15CM C/SERRILHA; PINÇA ADSON BROWN; PINÇA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES; PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO (MICRO) 11CM - RETA E CURVA; PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA APLICADORA MTA; PINÇA AUXILIAR DE SUTURA 12,15CM; PINÇA BISHOP C/SERRILHA 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHOP C/ DENTE 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHOP MINI MICRO 8CM - RETA E CURVA - COM E SEM DENTE; PINÇA BRACKTER; PINÇA BULDOG 4,5,6CM - RETA E CURVA DIEFFENBACH; PINÇA PERRY ; PINÇA PERRY COM E SEM CANALETA; PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO; PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO (LISA); PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO C; PINÇA CLINICA 317; PINÇA CLINICA 318; PINÇA CLINICA ODONTOPEDIATRIA 13 E 17CM; PINÇA P/ ENDO CRUZADA;

PINÇA P/ ENDO COM TRAVA; PINÇA CRANE KAPLAN JG. C/ 2; PINÇA CRANE KAPLAN 65D; PINÇA CRANE KAPLAN 65E; PINÇA CUSHING C/SERRILHA 18CM RETA; PINÇA CUSHING RETA COM 1X2 DENTES 18CM; PINÇA DENTE DE RATO MICRO RETA E CURVA; PINÇA DENTE DE RATO 12,14,16CM; PINÇA DEBACKEY DIETRICH 14,16,18,20,24,30CM; PINÇA DESMARRES 9CM; VALVULA AUVARD 21CM 38X80MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X30MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X35MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X40MM; VALVULA BREISKY 35CM 160X40MM; VALVULA DE LEE P/OBSTETRÍCIA 37CM; VALVULA DOYEN 24CM 45X60MM; VALVULA DOYEN 24CM 45X90MM; VALVULA DOYEN 24CM 45X120MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X60MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X90MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X120MM; VALVULA DOYEN SUB-PUBIANA ; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFOR 70X100 RETA; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFOR CURVA 45X80; VALVULA PIPER P/ OBSTETRÍCIA 44CM; ABAIXA LINGUA BRUENING 19CM; ABAIXA LINGUA WEIDER; AFASTADOR ARARAQUARA; AFASTADOR AUFRICHT 16,19CM; AFASTADOR BENNETT 24CM; AFASTADOR BRANEMARK; AFASTADOR COLUMBIA; AFASTADOR DE BAUER DIREITO,ESQUERDO E RETO; AFASTADOR DEEVER 18 CM 19MM; AFASTADOR DEEVER 21,5CM 22MM; AFASTADOR DEEVER 23 CM 25MM; AFASTADOR DEEVER 30 CM 25MM; AFASTADOR DEEVER 30 CM 38MM; AFASTADOR DEEVER 30 CM 50MM; AFASTADOR DEEVER 30 CM 75MM; AFASTADOR DEEVER 33 CM 25MM; AFASTADOR DEEVER 36 CM 25MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X9MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X10MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X12MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 11X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 12X16CM; AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13X125MM; AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA 14X150MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA GRANDE 20X180MM; AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM; AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO; AFASTADOR HOHMANN 8MM; AFASTADOR HOHMANN 18MM ; AFASTADOR HOHMANN 22MM; AFASTADOR HOHMANN 24MM; AFASTADOR HOHMANN 33MM; AFASTADOR HOHMANN 43MM ; AFASTADOR HOHMANN 70MM; AFASTADOR ISRAEL 23CM - COM 4,5 E 6 DENTES; AFASTADOR KOCHER 22CM - COM 2,3,4 E 6 DENTES ROMBOS; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 30X11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 30X16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X7MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X10MM;

AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X15MM; AFASTADOR LOVE 45° ANGULADO; AFASTADOR LOVE 60° ACOTOVELADO; AFASTADOR LOVE RETO; AFASTADOR MATHIEU; AFASTADOR MEAD; AFASTADOR MENTO; AFASTADOR MINESSOTA; AFASTADOR MINESSOTA C/SUGADOR; AFASTADOR MINESSOTA CAWOOD; AFASTADOR OBWEGER P/ BAIXO; AFASTADOR OBWEGER P/ CIMA; AFASTADOR OBWEGER P/ RAMA N1,N2; AFASTADOR OBWEGER P/ MEN; AFASTADOR OBWEGER P/ PROGENISMO; AFASTADOR OLLIER C/ 2 E 4 DENTES - 22.5CM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 24X20MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 33X29MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 40X38MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 50X22MM; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 15CM DENTE ROMBO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 15CM DENTE AGUDO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17CM DENTE ROMBO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17CM DENTE AGUDO; AFASTADOR STEMBERG; AFASTADOR VOLKMANN 22CM - COM 1,2,3,4 E 6 DENTES ROMBOS E AGUDOS; AFASTADOR WOLKMAN N° 2,3,4;; APLICADOR DE CERA JLT; APLICADOR DYCAL ANGULADO ADULTO E INFANTIL; APLICADOR DYCAL SIMPLES ADULTO; APLICADOR DYCAL SIMPLES INFANTIL; APLICADOR DYCAL RETO ADULTO E INFANTIL; ARCO DE YONG; BRUNIDOR DUPLO N° 01 (Z) ADULTO E INFANTIL; BRUNIDOR DUPLO N° 02; BRUNIDOR DUPLO N° 03; BRUNIDOR DUPLO N° 04; BRUNIDOR DUPLO N° 06; BRUNIDOR DUPLO N° 21; BRUNIDOR SIMPLES N° 26; BRUNIDOR SIMPLES N° 28; BRUNIDOR SIMPLES N°29; BRUNIDOR SIMPLES N° 30; BRUNIDOR SIMPLES N°31; BRUNIDOR SIMPLES N° 32; BRUNIDOR SIMPLES N.33; BRUNIDOR WADSWORTH-TODD BICO PASSARINHO; CABO P/ ESPELHO DE LARINGE; CABO P/ ESPELHO BUCAL CG; CABO P/ ESPELHO BUCAL INOX; CABO P/ BISTURI 03; CABO P/ BISTURI 04; CABO P/ BISTURI 05 ANGULADO E RETO; CABO P/ BISTURI 5A; CABO P/ BISTURI 07; CABO P/ BISTURI 360°; CABO P/ BISTURI LÂMINA DUPLA; CABO P/ ESPELHO BUCAL ADULTO; CABO P/ ESPELHO BUCAL INFANTIL; CABO P/ SERRA DE GIGLE; CALCADOR 6331-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-3 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-5 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-3 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-5 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6335 N° 1 (PARA SILICATO); CALCADOR 6335-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR

6335-3; CALCADOR 6335-4; CALCADOR 6337-1; CALCADOR 6337-2; CALCADOR 6337-3; CALCADOR BENNET (QUÁDRUPLO); CALCADOR C.BUENO 1,2,3,4,5; CALCADOR C.BUENO - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR CLASSE V LATERAL; CALCADOR CLASSE V RETO; CALCADOR CLEVDENT Nº 21 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR DE AMARRILHO Nº 1,2; CALCADOR DE BANDA; CALCADOR DE BANDA C/ UNHA DE GATO; CALCADOR DE HOLLEMBACK 1 (ADULTO E INFANTIL); CALCADOR DE HOLLEMBACK 2,3,4,5,6,7 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR DE LUCA; CALCADOR DE PAIVA 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA - JOGO C/ 4 PEÇAS; CALCADOR DE PAIVA VERTICAL 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 1-2; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 3-4; CALCADOR DE WARD 1,2,3,4,5,6 - (ADULTO E INFANTIL); CALCADOR DEUS 01,02,03,04,05; CALCADOR DEUS - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR DONALDSON 01, 02, 03, 04, 05; CALCADOR EAMES; CALCADOR ENDO 1-2, 3-4; CALCADOR ESPATULADO 30 LONGO; CALCADOR FIO RETRATOR SZ - RETO E CURVO ; CALCADOR FIO RETRATOR CG - RETO E CURVO ; CALCADOR KEER 07, 08, 09, 10; CALCADOR LADMORE Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; CALCADOR M.CAMARGO - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; CALCADOR M.CAMARGO - JOGO C/ 11 PEÇAS; CALCADOR MORTSON; CALCADOR P/ BANDA; CALCADOR P/ FIO REDONDO; CALCADOR P/ FIO REDONDO SERRILHADO - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDONDO SERRILHADO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDONDO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO RETO; CALCADOR P/ ORTO; CALCADOR PARA ORTO COM RANHURA; CALCADOR RABO DE PEIXE; CALCADOR RIELSON 1, 2, 3, 4, 5; CALCADOR RIELSON - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR SPUTINIK; CALCADOR WOODSON 6337 Nº 1, 2, 3; CALCADOR DUPLO 3085; CALCADOR PARA RESINA (BOLINHA - EM); CALCADOR DUPLO 3091 (BOLINHA); CALCADOR DUPLO 3092; CALCADOR DUPLO 3093; CALCADOR DUPLO 3094; CALCADOR DUPLO 3095; CALCADOR DUPLO 3096; CALCADOR DUPLO 3097; CALCADOR DUPLO 3098; CALCADOR DUPLO 3099; CALCADOR DUPLO 3100; CALCADOR DUPLO 3101; CALCADOR DUPLO 3102; CALCADOR DUPLO 3103; CALCADOR DUPLO 3104; CALCADOR DUPLO 3105; CALCADOR DUPLO 3106; CALCADOR DUPLO 3107; CALCADOR DUPLO 3108; CALCADOR DUPLO 3109; CALCADOR DUPLO 3110; CALCADOR DUPLO 3111; CALCADOR DUPLO 3112; CALCADOR DUPLO 3113; CALCADOR DUPLO 3114; CALCADOR DUPLO 3115; CALCADOR DUPLO 3116; CALCADOR DUPLO 3117; CALCADOR DUPLO 3118; CALCADOR DUPLO 3119; ESPATULA DUPLA 72; ESPATULA DUPLA 74; ESPATULA DUPLA 3040; ESPATULA DUPLA 3041; ESPATULA DUPLA

3042; ESPATULA DUPLA 3043; ESPATULA DUPLA 3044; ESPATULA DUPLA 3045; ESPATULA DUPLA 3046; ESPATULA DUPLA 3047; ESPATULA DUPLA 3048; ESPATULA DUPLA 3049; ESPATULA DUPLA 3050; ESPATULA DUPLA 3051; ESPATULA DUPLA 3052; ESPATULA DUPLA 3053; ESPATULA DUPLA 3054; ESPATULA DUPLA 3055; ESPATULA DUPLA 3056; ESPATULA DUPLA 3057; ESPATULA DUPLA 3058; ESPATULA DUPLA 3059; ESPATULA DUPLA 3060; ESPATULA DUPLA 3061; ESPATULA DUPLA 3062; ESPATULA DUPLA 3063; ESPATULA DUPLA 3064; ESPATULA DUPLA 3065; ESPATULA DUPLA 3066; ESPATULA DUPLA 3067; ESPATULA DUPLA 3068; ESPATULA DUPLA 3069; ESPATULA DUPLA 3070; ESPATULA DUPLA 3071; ESPATULA DUPLA 3072; ESPATULA DUPLA 3073; ESPATULA DUPLA 3074; ESPATULA DUPLA 3075; ESPATULA DUPLA 3076; ESPATULA DUPLA 3077; ESPATULA DUPLA 3078; ESPATULA DUPLA 3079 (FIO RETRATOR REDONDO); ESPATULA DUPLA 3080; ESPATULA DUPLA 3081; ESPATULA DUPLA 3082; ESPATULA DUPLA 3083; ESPATULA DUPLA 3084; ESPATULA DUPLA 3085; ESPATULA DUPLA 3086; ESPATULA DUPLA 3087; ESPATULA DUPLA 3088; ESPATULA DUPLA 3089 (FIO RETRATOR); ESPATULA DUPLA 3090; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X20MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X25MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X30MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X35MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X40MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X45MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X50MM; ESPATULA HEIDMAN 1, 2 - ITALIA; ESPATULA INTRAFIL; ESPATULA MARGRAF Nº 1, 2; ESPATULA MARGRAF JOGO C/ 2; ESPATULA MSC; ESPATULA MSF; ESPATULA MSS; ESPATULA Nº 1; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM TP 3; PINÇA DIETRICH 14,16CM; PINÇA DOYEN 18,25CM RETA E CURVA; PINÇA HISTOLÓGICA 12,14,16CM; PINÇA JONES P/CAMPO 9CM; PINÇA LOWMAN 12, 18, 20CM; PINÇA LUCAE BAIONETA 14,16CM; PINÇA MICRO FORCEPS CURVO COM PLATAFORMA 18CM ; PINÇA MICRO FORCEPS RETO COM PLATAFORMA 18 CM; PINÇA MULLER P/ CARBONO; PINÇA NELSON 16, 18,2CM; PINÇA ODONTOPEDIATRIA; PINÇA P/ BRACKTER; PINÇA P/ COPIN ; PINÇA PATA DE GATO (RUSSA)15, 20CM ; PINÇA PORTA MTA; PINÇA STEVENS COM SERRILHA - RETA E CUVA - 10,11,14 CM ; PINÇA STEVENS 1X2 DENTES RETA E CURVA - 10,11,14 CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 16CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 18CM; RÉGUA MILIMETRADA; RÉGUA MILIMETRADA C/ CALIBRADOR; SONDA DE RHEIN N. 1, 2, 3; SONDA EXPLORADORA Nº 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17S-23S, 23, 47; SONDA MILIMETRADA 23 (MICHIGAN); SONDA

MILIMETRADA DE GLICKMAN; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX DUPLA; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX Nº 4; SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA (CPUNC 15); SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA; SONDA MILIMETRADA OMS; SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA; SONDA MILIMETRADA PC 12; SONDA MILIMETRADA SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS Nº 23; SONDA MILIMETRADA; SONDA MILIMETRADA DUPLA; SONDA NABERS 1N; SONDA NABERS 2N; SONDA TENTACÂNULA 15CM; SUGADOR DE SANGUE CURVO E RETO; TRITURADOR PARA OSSO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.

Indicação de Uso/Finalidade

As espátulas são utilizadas em procedimentos odontológicos pelo cirurgião dentista quando este necessitar confeccionar um preparo cavitário com a finalidade de desenvolver através de restauração a estética e a função ao dente do paciente, usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.

4. Modo de Uso do Produto

4.1. Instruções:

O produto é um material de uso permanente, não estéril, portanto deverá ser esterilizado antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos. Após ser utilizado o produto deverá ser lavado e secado imediatamente.

4.2. Utilização:

A utilização dos instrumentos descritos nesse processo deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita aos ambientes clínicos e hospitalares, com os seguintes cuidados:

Manuseio e movimentação:

Os instrumentos devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção técnica, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

Inspeção Técnica:

Todos os instrumentos da família, antes de serem disponibilizados para uso, devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado, objetivando a verificação da sua integridade. O instrumental reprovado deve ser separados para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destino para descarte.

Limpeza:

Os instrumentos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados. Em hipótese alguma utilize palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo quando saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Esterilização:

Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

NOTA: Todo o instrumental deve ser lavado imediatamente após sua utilização e antes que as secreções ou sangue possam secar. Aqueles que puderem devem ser lavados e desmontados.

4.3. Reutilização:

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, cinco etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue e a secagem.

Limpeza prévia:

Para limpeza do instrumento, usar somente sabão neutro a 1% ou detergente enzimático neutro. Não usar solução química, por ser corrosiva.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser

rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Os instrumentais devem ser introduzidos abertos ou desmontados, quando pertinente.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos, para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microrganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, nãoelimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do material, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

O instrumental deve ser mergulhado aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas

inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação:

É feita através da imersão do instrumental aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem:

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias. O instrumental, quando pertinente, deve ser desmontado e cada componente lavado isoladamente. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágue:

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

Inspeção e lubrificação:

Após o enxágue, deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de quaisquer sujidades ou outros resíduos.

O instrumental deve lubrificado, utilizando-se de óleo mineral não pegajoso, isento de silicone e solúvel em água (hidrosolúvel), que suporte autoclavagem.

Recomenda-se que, quando pertinente, sejam seguidas as instruções do fabricante do lubrificante.

4.4. Descarte:

Quando da necessidade de se descartar o instrumental, o mesmo deve ser inutilizado imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados com identificação clara de que se trata de lixo contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais, deve-se seguir os procedimentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

4.5. Manutenção e conservação

- ✓ Examine o instrumento antes do uso. NUNCA o utilize em caso de defeito, presumido ou aparente.
- ✓ Em qualquer tipo de água há concentração de sais. Mesmo em uma água considerada potável, existe a possibilidade de concentração de certos elementos químicos que poderão danificar os instrumentos.
- ✓ Se na água houver alguma concentração de Ferro, Cobre, Manganês, Magnésio ou Silício poderá haver a formação de manchas com cores diversas: marrom, azul ou arco-íris. Nesse caso não se trata de corrosão, mas sim de manchas.

- ✓ Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão.
- ✓ Não armazenar o instrumental perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos, a saber: Cloro, Iodo e Ácidos em geral.
- ✓ Cada instrumento foi criado e desenvolvido para executar uma determinada função, portanto, ele não deve ser utilizado fora dessas condições. Os instrumentos utilizados fora das suas condições normais de trabalho podem quebrar ou ter a sua vida útil reduzida.

5. Método de esterilização

Produto não Estéril, esterilização executada nos hospitais e clínicas, cujo o processo mais utilizado é o auto clave nas seguintes temperaturas:

Temperatura (°C)	Tempo (min)
121 (1,0 atm)	20
126 (1,4 atm)	10
134 (2,0 atm)	3

O aquecimento e o esfriamento dos instrumentais provocam dilatações e contrações.

Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual, a qual poderá apresentar manchas e/ou corrosão no instrumental.

O produto após esterilizado deve ser armazenado em sua embalagem não violável, seguindo os cuidados básicos de armazenagem.

6. Condições de armazenamento

O instrumental deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e evitando danificação da embalagem. O indicado é armazenar em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Devem ser evitados riscos, dobras ou entalhes dos instrumentos cirúrgicos, visto que tais fatores aumentam a possibilidade de corrosão dos produtos.

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação dos instrumentos devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e

conservação devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos para saúde.

7. Condições para o transporte

Os instrumentais devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração de suas características físicas ou qualquer deterioração da embalagem. Não são aplicáveis parâmetros específicos de temperatura e umidade.

É recomendado que o responsável pelo transporte evite choques mecânicos.

8. Condições de Manipulação

Os instrumentos devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção prévia, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

9. Advertências

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para finalidades diferentes podem prejudicar a evolução do procedimento. A combinação dos produtos GOLGRAN com os de outros fabricantes pode apresentar diferenciação em material, em desenho ou qualidade. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso dos instrumentais ou das suas partes. Havendo desempenho variado, perda de precisão, instabilidade ou falta de precisão deve-se imediatamente substituir a peça.

10. Precauções

Os instrumentos devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilização e uso. Após o uso, deve ser realizada uma limpeza correta, a fim de evitar incrustações e corrosões. Verificar, a cada uso, se os instrumentais não sofreram dano.

Somente profissionais especializados e treinados nas técnicas cirúrgicas poderão utilizar estes

instrumentais.

Os instrumentais não devem ser armazenados em local onde também são armazenados produtos químicos que podem exalar vapores corrosivos.

Ainda que os instrumentais sejam fabricados em material oxidável, o correto manuseio e manutenção adequada do material é imprescindível para a conservação de suas características. Dessa forma, é indicado que sejam seguidas as orientações do fabricante quanto aos processos de limpeza, esterilização, manuseio, transporte e armazenamento.

11. Contraindicações

Não se aplica

12. Efeitos adversos

Não se aplica

13. Restrições ao uso

Por se tratar de um instrumental cirúrgico ou odontológico o mesmo deverá ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas e a critérios médicos.