



Comfort, Health and Style!

REDUÇÃO EFETIVA DO EDEMA. FÁCIL DE APLICAR.

JOBST® COMPRI 2 – NOVO
SISTEMA DE COMPRESSÃO
DE 2 CAMADAS

THERAPIES. HAND IN HAND.



A COMPRESSÃO CORRETA É FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO

Redução de edemas e cicatrização de úlceras dependem do diagnóstico correto e do nível de compressão adequado. Em primeiro lugar, é fundamental determinar a etiologia da úlcera para garantir que a compressão correta seja aplicada: **mais acentuada** se etiologia venosa; **menos acentuada** se etiologia mista; ou **nenhuma** no caso de úlceras arteriais, onde a terapia compressiva é contraindicada.

Em segundo lugar, é necessário aplicar o nível de compressão correto para que o tratamento seja efetivo e benéfico para o paciente, dure somente o tempo necessário e, como resultado, apresente o menor custo possível.

CLASSIFICAÇÃO CEAP DA DOENÇA VENOSA CRÔNICA

Em relação às úlceras de etiologia venosa, o edema é mais presente no intervalo C3-C6 da classificação CEAP.


C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa	Telangiectasias ou veias reticulares	Veias varicosas	Edema	a. Pigmentação e/ou eczema b. Lipodermatoesclerose e/ou atrofia branca	Úlcera venosa cicatrizada	Úlcera venosa aberta
			← Redução do edema →			

Fonte: O'Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum



ÚLCERA VENOSA: ESCOLHENDO O SISTEMA DE COMPRESSÃO ADEQUADO

O tratamento de uma **úlcera venosa** é abrangente: depende da escolha do sistema de compressão correto para cada paciente, associado ao tratamento concomitante de cuidado da pele e da ferida.

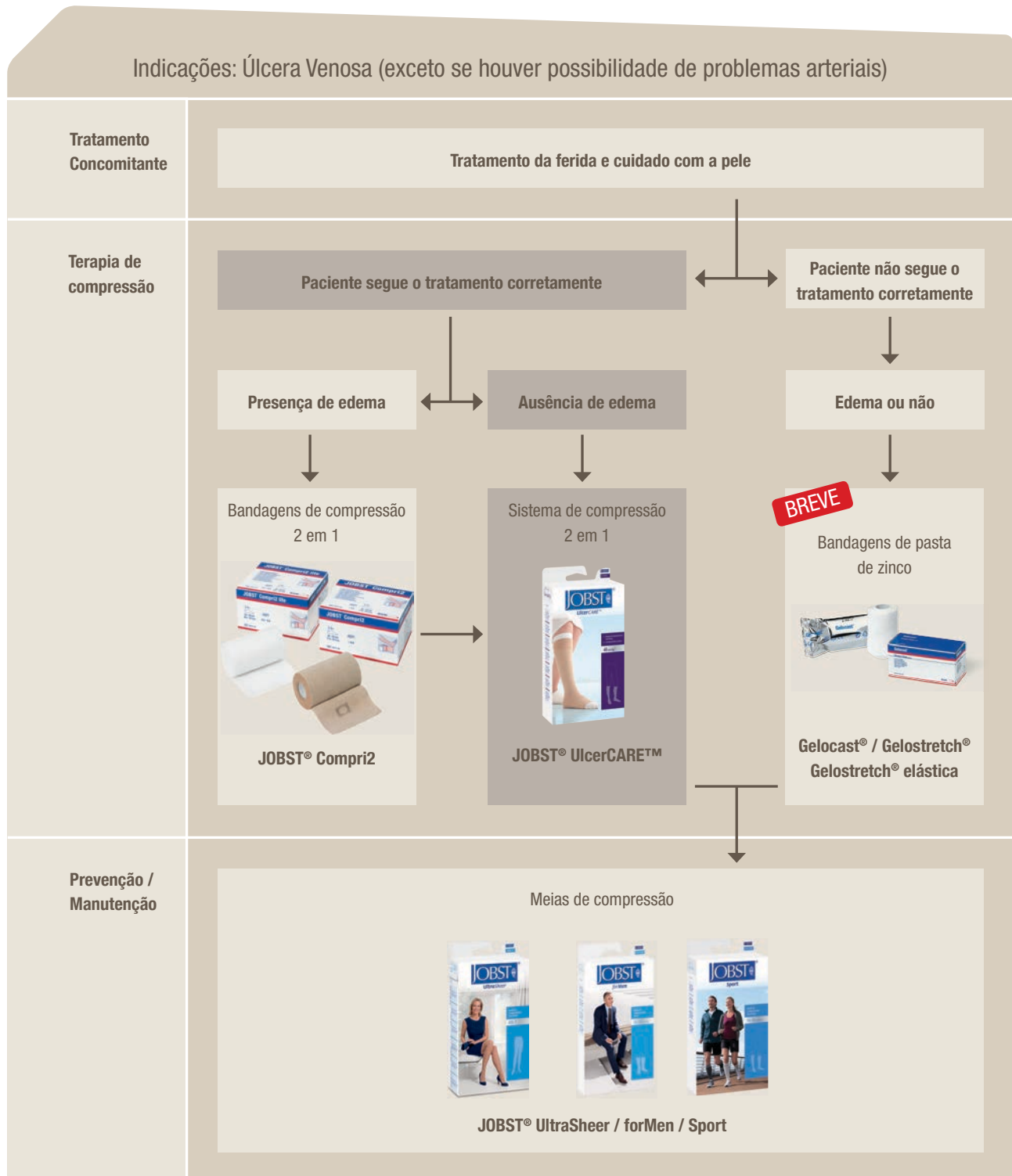

No caso de pacientes que seguem o tratamento corretamente, os sistemas 2 em 1 são a escolha adequada de tratamento, pois além de proporcionarem o gradiente de compressão recomendado, também oferecem o máximo de mobilidade e conforto para o paciente.

O NOVO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE 2 CAMADAS

JOBST® COMPRI2


É um sistema de compressão graduada de 2 camadas indicado para úlceras nas pernas de etiologia venosa ou mista. Há dois modelos disponíveis: Compri2 e Compri2 lite. O primeiro atende os pacientes cujo índice de pressão tornozelo/braquial (*Ankle Brachial Pressure Index*, ABPI) é maior ou igual a 0,8. Já JOBST® Compri2 lite é recomendada para terapia compressiva em pacientes com ABPI entre 0,5 e 0,8. Em ambas as situações, os produtos têm como pré-requisito que o paciente deambule. O tempo recomendado de utilização é de até 7 dias.

FÁCIL APLICAÇÃO



1ª camada: Acolchoamento

- Extensibilidade tanto na largura quanto no comprimento facilita a aplicação em volta do tornozelo
- Corte da bandagem com as mãos possibilita aplicação de acolchoamento extra onde necessário

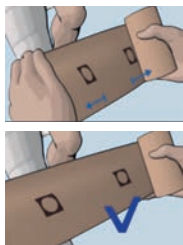

2ª camada: Compressão

- Indicador de compressão na superfície da bandagem garante que a aplicação resulte na compressão adequada ao tratamento
- Ajustes durante a aplicação são descomplicados



Instruções de uso completas e objetivas


- As instruções de uso são de fácil compreensão e apresentam figuras explicativas





- Faça download do aplicativo e tenha acesso ao vídeo de aplicação a qualquer hora e em qualquer local
- Informe e eduque seus pacientes com a ajuda de JOBST® Compri2

- QR codes na embalagem direcionam seu smartphone ou tablet diretamente para os vídeos de aplicação do produto

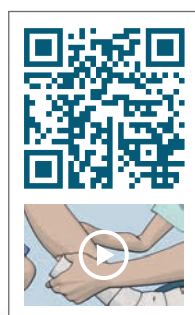

UMA JOBST® COMPRI2 PARA CADA NECESSIDADE



Etiologia da úlcera	ABPI	Nível de compressão	Modelo
Venosa	$\geq 0,8$	40 mmHg	JOBST® Compriz2
Mista	0,5-0,8	20-30 mmHg	JOBST® Compriz2 lite
Arterial	$< 0,5$	Sem compressão	

FUNCIONA PORQUE FACILITA A ADESÃO AO TRATAMENTO

Dois componentes-chave asseguram o sucesso da terapia compressiva: a compressão correta e a adesão do paciente à terapia. Se o tratamento for doloroso, desconfortável ou de alguma forma inconveniente, os pacientes relutarão em seguir as recomendações médicas.

“NINGUÉM PERCEBE QUE ESTOU USANDO AS BANDAGENS. POSSO ATÉ UTILIZAR MEUS CALÇADOS PREDILETOS.”


- JOBST® Compriz2 é um sistema de compressão de baixo volume, o que permite ao paciente maior liberdade de escolha de calçados.

“NUNCA IMAGINEI UMA BANDAGEM CUJA APLICAÇÃO PUDESSE SER TÃO FÁCIL E O USO TÃO INDOLOR.”

- Acolchoamento cortável à mão facilita a aplicação extra em regiões curvas, ajudando a reduzir a dor e os pontos de pressão.
- Gerenciamento ativo da umidade transfere líquidos para o interior do sistema mantendo a pele sempre seca.*

“É MARAVILHOSO PERCEBER A RAPIDEZ COM QUE O EDEMA ESTÁ DIMINUINDO”


- Uma régua de papel inclusa no sistema dá ao paciente e ao profissional de saúde a noção exata da redução do edema

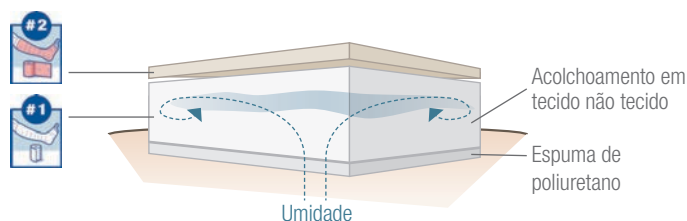

* Testes realizados internamente

JOBST® COMPRI2 PODE SER COMBINADO COM OUTROS PRODUTOS

TRATAMENTO AVANÇADO DE FERIDAS

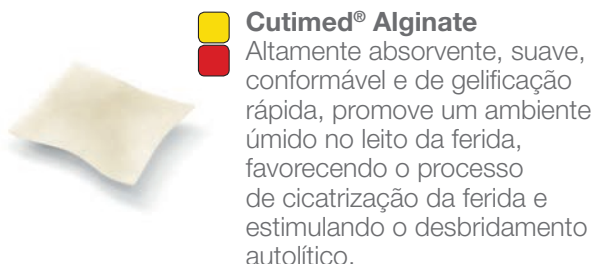

- Cutimed® Alginate**
Altamente absorvente, suave, conformável e de gelificação rápida, promove um ambiente úmido no leito da ferida, favorecendo o processo de cicatrização da ferida e estimulando o desbridamento autolítico.



- Cutimed® Cavity**
Para absorção e preenchimento de feridas cavitárias, gerencia a exsudação moderada e abundante.



- Cutimed® Siltec**
Mantém a umidade ideal no leito de feridas altamente exsudativas. Camada de contato em silicone permite trocas atraumáticas.



- Cutimed® Siltec Sorbact®**
Antimicrobiano com tecnologia DACC que atrai e retém microorganismos, indicado para feridas altamente exsudativas. Não tem contraindicações. Borda adesiva em silicone suave.



- Cuticell® Contact**
Cobertura primária transparente, atraumática, porosa e flexível, revestida com silicone suave em um dos lados. Permite a passagem do exsudato para um curativo secundário absorvente.

CUIDADOS COM A PELE



- Cutimed® PROTECT**
Reestabelece a função barreira da pele e protege as bordas da ferida.

COMPRESSÃO



- JOBST® UlcerCARE™**
Sistema de compressão 2 em 1 para o tratamento eficaz de úlceras venosas.



- JOBST® UltraSheer**
Meias elásticas compressivas transparentes para quem não abre mão de estilo e conforto.



- JOBST® forMen**
Meias elásticas compressivas masculinas que permitem terapia eficaz com discrição e elegância.

-  Feridas contaminadas, colonizadas, ou infectadas

-  Feridas com presença de tecido de granulação

-  Feridas com presença de necrose de liquefação (esfacelo)

-  Feridas com presença de tecido de epitelização

SOLUÇÕES INOVADORAS DE UM DOS LÍDERES MUNDIAIS EM TERAPIA COMPRESSIVA

A BSN medical oferece soluções de terapias integradas para tratar cada estágio da Doença Venosa Crônica (DVC). Como marca forte da BSN medical, JOBST® está constantemente desenvolvendo novas tecnologias e soluções avançadas para garantir uma gama completa de produtos para a gestão altamente eficaz da DVC.

	C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa	C1 Telangiectasias ou veias reticulares	C2 Veias varicosas	C3 Edema	C4 a. Pigmentação e/ou eczema b. Lipodermato-esclerose e/ou atrofia branca	C5 Úlcera venosa cicatrizada	C6 Úlcera venosa ativa
JOBST® Meias e Bandagens de Compressão	JOBST® Sport						
	JOBST® UltraSheer						
	JOBST® forMen						
		JOBST® Compri2 lite		JOBST® Compri2			
						JOBST® UlcerCARE™	
Cutimed® Cuidado Avançado de Feridas							Cuticell® Contact
							Cutimed® Alginate
							Cutimed® Cavity
							Cutimed® Siltec
							Cutimed® Siltec Sorbact®
Cutimed® Cuidado com a Pele							Cutimed® PROTECT

BSN medical

www.bsnmedical.com
sac@bsnmedical.com
Tel. 0800.70.45415

BSN medical