

AllPrime *dental products*

Instruções de Uso

COMPRESSA
DE GAZE

COMPRESSA DE GAZE ALLPRIME

Compressa

Produto não estéril de uso único.

Apresentação Comercial:

Compressa de Gaze acondicionadas em embalagem primária de Polietileno e posteriormente acondicionadas em caixas de papelão.

Apresentando os seguintes diâmetros:

Compressas de gaze 09 fios/cm²,
tamanhos; 7,5 x 7,5 cm, 5 dobras; 8 camadas - 500 unidades;

Compressas de gaze 11 fios/cm²
tamanhos; 7,5 x 7,5 cm, 5 dobras, 8 camadas - 500 unidades;

Compressas de gaze 13 fios/cm²
tamanhos ;7,5 x 7,5 cm, 5 dobras, 8 camadas - 500 unidades;

Indicações de Uso:

Absorção de sangue e exsudatos, anti-sepsia da pele e/ou mucosas e na confecção de curativos em geral.

Modo de Uso:

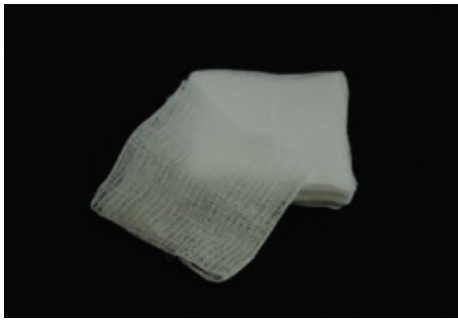
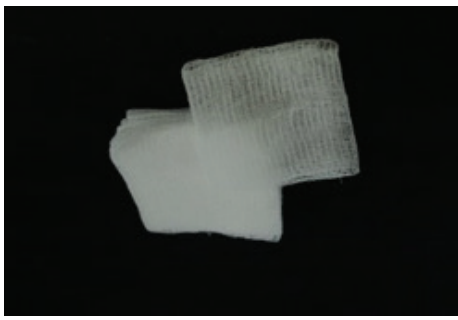
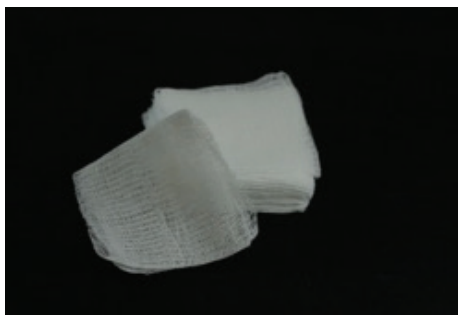
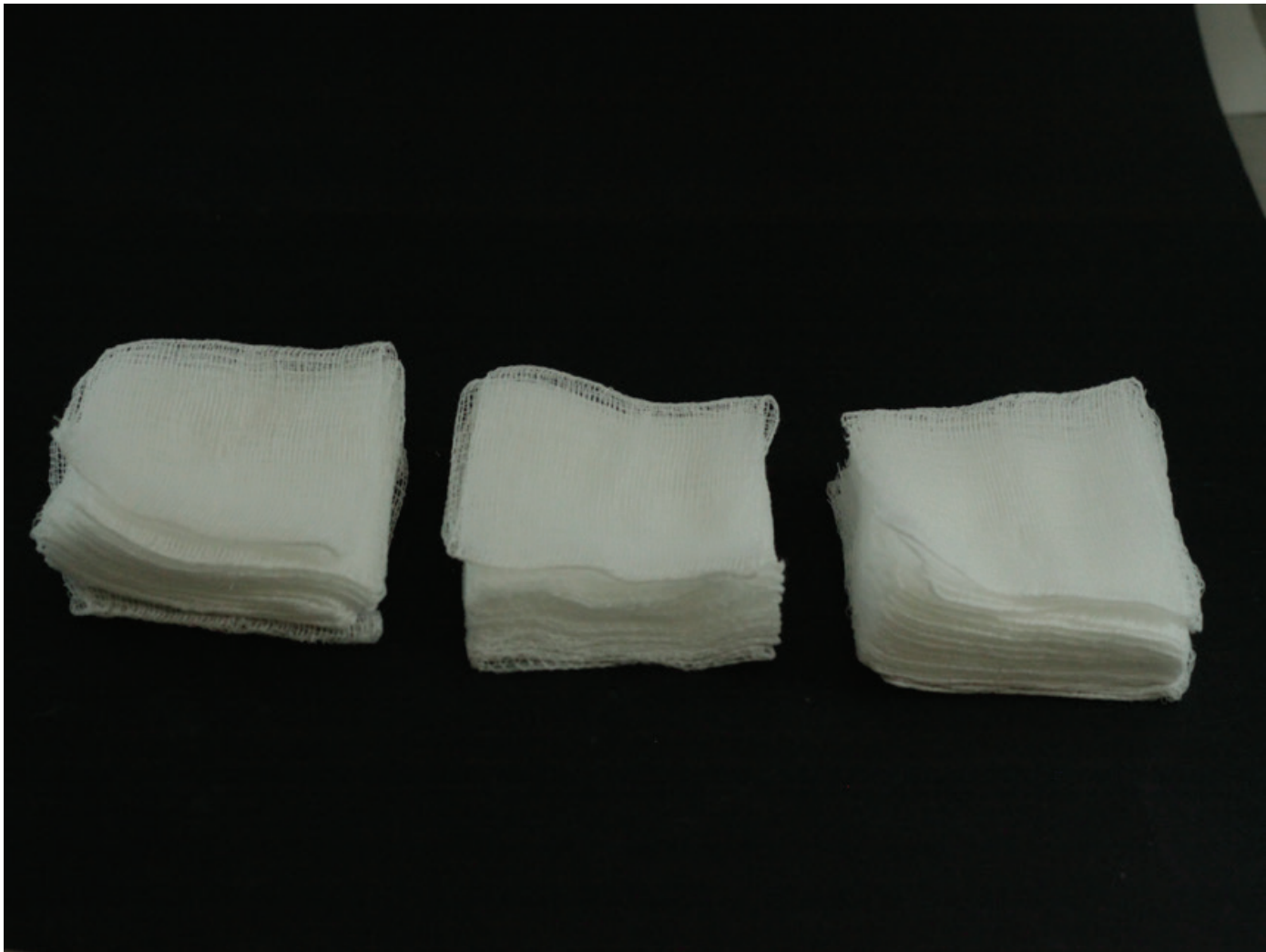
Lavar as mãos de forma asséptica e calçar luvas de procedimento ou cirúrgicas;

Abrir o pacote de compressas de gaze;

Utilizar para remoção de líquidos ou secreções ou em curativos de forma geral;

Efetuar descarte em local apropriado, seguindo Programa de gerenciamento de risco.

Tabela de Modelos:

		
N° 01 Compressa de gaze 9 fios	N° 02 Compressa de gaze 11 fios	N° 03 Compressa de gaze 13 fios
		

Composição:

100% algodão hidrófilo

Condições de Armazenamento e Transporte:

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas em temperatura ambiente de 4 a 40° C, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras.

Condições de Manipulação:

As embalagens devem ser manipuladas de forma que não haja nenhum tipo de avaria e assim seja mantida a integridade.

Condições de Esterilização:

Óxido de etileno, Vapor Saturado, Raios Gama.

Advertências:

Produto de uso único. Destruir após uso. Proibido reprocessar.

Precauções:

Conservar em local limpo, seco e ao abrigo de luz.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Validade:

5 anos a partir da data de fabricação.

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

ALLMED MEDICAL PRODUCTS COM., LTD.

Escritório DUKAL Corporation: 2 Fleetwood Court Ronkonkoma, NY
11779 – EUA
Fábrica : 180 Gongyuan Rd, Zhijiang, Yichang, Hubei.
China
www.allmed-china.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630003
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870