

**AllPrime** *dental products*

Instruções de Uso

EMBALAGEM  
PARA  
ESTERILIZAÇÃO

# Embalagem para Esterilização

Produto não estéril de reprocessamento proibido.

## Apresentação Comercial:

A Embalagem para Esterilização AllPrime é utilizada como uma barreira física de filtração de microrganismos. É encontrada nos seguintes modelos:

## ROLOS:

Embalagem secundária de papelão e embalagem primária de papel cartão contendo:

Largura	Comprimento
5,0cm	100 ou 200m
5,5cm	100 ou 200m
7,5cm	100 ou 200m
8,0cm	100 ou 200m
10,0cm	100 ou 200m
15,0cm	100 ou 200m
20,0cm	100 ou 200m
25,0cm	100 ou 200m
30,0cm	100 ou 200m

## ENVELOPES:

Embalagem secundária de papelão e embalagem primária de papel cartão contendo:

Medidas	Quantidade
5,0x13cm	100 ou 200 unidades
7,0x26cm	100 ou 200 unidades
9,0x16cm	100 ou 200 unidades
9,0x26cm	100 ou 200 unidades
14x26cm	100 ou 200 unidades
14x29cm	100 ou 200 unidades
15x25cm	100 ou 200 unidades
15x30cm	100 ou 200 unidades
19x33cm	100 ou 200 unidades
19x37cm	100 ou 200 unidades

20x30cm	100 ou 200 unidades
23x30cm	100 ou 200 unidades
24x38cm	100 ou 200 unidades

## Indicação de Uso:

Acondicionar e garantir a esterilidade de materiais submetidos a ciclos de esterilização por gás de óxido de etileno ou vapor (autoclave).

## Modo de Uso:

1.Preparar os materiais a serem esterilizados de acordo com o protocolo da unidade de saúde.

2.Colocar o material na embalagem e selar as mesmas. Não encostar os instrumentais uns nos outros dentro da embalagem, deixando 1 cm até o selamento lateral evitando perfurações. Não sobrepor as bandejas uma sobre as outras. Colocar a embalagem dentro da autoclave com a face do papel grau cirúrgico para cima.

3.Realizar o ciclo de esterilização.

4.Certificar se houve a mudança de cor rosa para marrom nos indicadores químicos de processos de esterilização, para óxido de etileno ou vapor (autoclave), conforme o caso, no final do processo.

## Modelos Comerciais:

Rolo para Esterilização.



## Envelope de Esterilização Autoselante.



### Composição:

Rolo para Esterilização:

Papel grau cirúrgico: gramagem 60 g/m<sup>2</sup>

Poliéster / polipropileno: espessura 52 µm; Gramagem 54 g/m<sup>2</sup>

Envelope de Esterilização Autoselante:

Papel grau cirúrgico: gramagem 60 g/m<sup>2</sup>

Poliéster / polipropileno: espessura 52 µm; Gramagem 54 g/m<sup>2</sup>

### Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação:

Armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva.

### Advertências:

Não utilizar o produto caso a embalagem não esteja íntegra; O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar infectante. Descarta-se em recipientes apropriados com identificação de lixo infectante. A sua eliminação deverá ser feita de acordo com as normas locais de segurança para este determinado produto e

## Normas Ambientes Vigentes.

### Precauções:

- Produto de uso único.
- Descartar após o uso.
- Proibido reprocessar.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contra-indicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

### Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabricação

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em 0800 702 0227

### Fabricado por:

Euronda S.p.A

Via Chizzalunga, n. 1 -36066 Sandrigo (Vi)

(+39) 0445 329811

Itália

[www.euronda.com](http://www.euronda.com)

### Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630002

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870

