

AIIP *dental products*
Prime

Instruções de Uso

ESPELHO BUCAL

ESPELHO BUCAL ALLPRIME

Espelho Bucal

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:

O Espelho Bucal AllPrime encontra-se em embalagem primária de Polietileno, embalados com 1,2 ou 12 unidades e posteriormente acondicionados em caixas de papelão. Estão disponíveis nos seguintes modelos:

Espelho bucal plano nº 3

Espelho bucal plano nº 4

Espelho bucal plano nº 5

Espelho bucal plano nº 6

Espelho bucal 1º Plano nº 5

Espelho com aumento nº 5

Indicação de Uso:

O espelho bucal é um refletor de imagem utilizado na visualização da arcada dentária.

Modo de Uso:

O espelho bucal é encaixado (rosqueado) a um cabo que pode ser redondo ou octagonal, sólido ou oco, sendo este cabo vendido separadamente. O espelho bucal é utilizado exclusivamente por profissional habilitado, em procedimentos odontológicos.

Modelo Comercial: Espelho Bucal AllPrime



Composição:

Espelho bucal - Aço AISI 304 não magnético

Condições de Armazenamento e Transporte:

Os Espelhos bucais devem ser armazenados em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

Condições de Manipulação:

Todos os espelhos bucais devem ser tratados com cuidado, enquanto transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Condições de Esterilização:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F (Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

Advertências:

Os espelhos bucais devem ser limpos e esterilizados antes da utilização;

Também devem ser desinfetados antes da autoclavagem;

Os espelhos bucais com trava devem ser mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

Precauções:

Os espelhos bucais devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade:

Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

Medisporex PVT Ltda

Khadim Ali Rd, Mohalla Khajori Wala, Sialkot, Punjab 51310,

Paquistão

<https://medisporex.com/>

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630010
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870