

AIIP *dental products*
Prime

Instruções de Uso

GUTAPERCHA

GUTAPERCHA

Produto não estéril de reprocessamento proibido

Apresentação Comercial:

A embalagem primária de guta-percha consiste em estojos plásticos ou tubos plásticos de PP/PE (polipropileno/polietileno) devidamente identificadas e etiquetadas, sendo posteriormente acondicionados em caixas de papelão.

Versões comerciais:

- Dispenser com 6 compartimentos;
- Dispenser com tampa deslizante;
- Embalagem com 6 frascos quadrados;
- Embalagem com 6 frascos redondos;
- Dispenser com 4 compartimentos;
- Dispenser redondo com 12 compartimentos à prova de vazamentos.

As embalagens podem conter 100,120,180,200,240 unidades, sendo divididas de acordo com o tamanho, conicidade ou diâmetro do produto.

O acondicionamento primário pode encontrar-se na forma de tubo plástico transparente.

Indicação de Uso:

A Gutapercha é utilizada em consultórios dentários por profissionais habilitados, sendo que sua principal finalidade é o selamento completo do conduto radicular em endodontia.

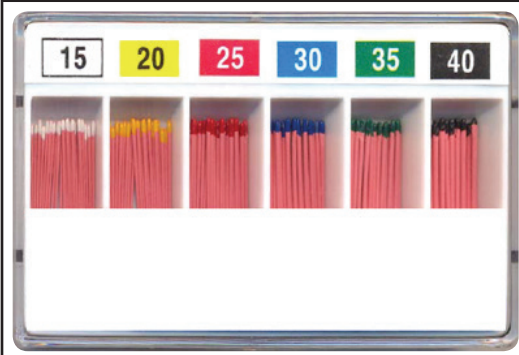
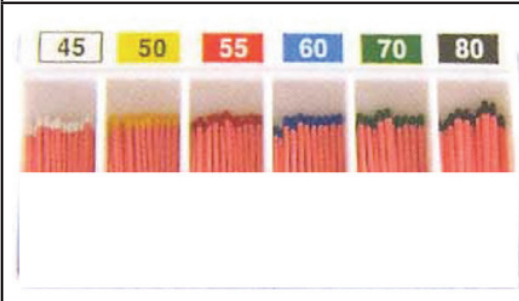

Apresenta radiopacidade, comprimentos estão apontados. Adequado para condensação vertical ou horizontal.

1. Promove a cura periapical e previne a progressão da doença.
2. O uso apropriado da gutapercha em endodontia tem a finalidade de selar o canal, que se torna impermeável à líquidos e bactérias.

Modo de Uso:

1. Prepare o canal radicular com o auxílio das limas manuais;
2. Depois de limpar e secar o canal com uma solução de EDTA, aplicar o selante na parede do canal radicular com pontas de papel.
3. Selecione a gutapercha principal de acordo com as características do canal radicular preparado.
4. Irrigue a gutapercha com solução de NaOCl 5,25% para desinfecção.
5. Insira a guta-percha principal no canal radicular no comprimento de trabalho.
6. Insira as gutas acessórias no canal com o auxílio do condensador de gutapercha.
7. Confirmar o preenchimento completo através de raio-x.

IMAGENS E MODELOS:

	<p>Gutapercha Calibrada</p> <p>Modelos:</p> <p>15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15-40, 45-80</p>
	<p>Guta percha Acessória</p> <p>Modelos:</p> <p>X-Fine, Fine-Fine, Medium-Fine, Fine, Fine-Medium, Medium, Medium-Large, Large, X-Large, F1, F2, F3.</p>
	<p>Gutapercha Japonesa</p> <p>Modelos:</p> <p>JF-S, JF-M, JF-L, JS, JM, JL, JL-M, JL-L, XX-F, X-F, Fine, Medium</p>

	<p>Gutapercha Special Taper (.04, .06, .08) Modelos: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80</p>
	<p>Embalagem com: 6 frascos quadrado</p>
	<p>Embalagem com: 6 frascos redondos</p>
	<p>Dispenser 6 compartimentos</p>
	<p>Dispenser com 4 compartimentos</p>
	<p>Dispenser redondo com 12 compartimentos à prova de vazamentos.</p>

Composição:

Gutapercha, óxido de zinco, sulfato de bário, carbonato de cálcio e excipientes.

Condições de Armazenamento e Transporte:

O armazenamento e transporte deve ser feito em local arejado, seco, ao abrigo de luz, entre 18° e 24°C. Os produtos deverão ser mantidos em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

Condições de Manipulação:

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializada na área odontológica em local arejado, seco, ao abrigo da luz.

Condições de Esterilização:

Raio Gama

Advertências:

Não esterilizar em autoclave. Não utilizar em caso de embalagem violada.

Precauções:

Os produtos devem ser mantidos em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade

3 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento

ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:



Meta Biomed Co. Ltd.

270 Osongsaengmyeong1-ro

Osong-eup, Heungdeok-gu

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do - 363-951

Telefone: 043-218-1981 / Fax: 043-218-1984

www.meta-biomed.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630011

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870