

AIIP *dental products*
Prime



Instruções de Uso

**INSTRUMENTO
ODONTOLÓGICO
NÃO ARTICULADO
CORTANTE**

INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE AIR ALLPRIME

Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:

Os Instrumentos Odontológicos Não Articulados Cortantes Air AllPrime são embalados individualmente ou em kit com 03 instrumentos, encontram-se disponíveis em embalagens primárias de Polietileno e posteriormente acondicionados em caixas de papelão.

Indicação de Uso:

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Modo de Uso:

As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

Modelos Comerciais e Indicações de Uso:

Alavanca Cryer esquerda
Alavanca Cryer direita
Alavanca Esquerda 3mm linha reta
Alavanca Esquerda curva redonda 3mm
Alavanca Esquerda curva redonda 4mm
Alavanca Direita redonda 4mm
Alavanca Direita 3mm linha reta
Alavanca Direita curva redonda 3mm
Alavanca Flohr esquerda
Alavanca Flohr direito

Cureta 204S dupla
Cureta 204SD dupla
Cureta Gracey 11-12 Dupla
Cureta Gracey 1-2 Dupla
Cureta Gracey 13-14 Dupla
Cureta Gracey 15/16 Dupla
Cureta Gracey 17/18 Dupla
Cureta Gracey 3-4 Dupla
Cureta Gracey 5-6 Dupla
Cureta Gracey 7-8 Dupla
Cureta Gracey 9-10 Dupla
Cureta H6/7 dupla
Cureta S5/33 dupla
Cureta S6/S7 dupla
Cureta Sickle 23 (foice)
Cureta U15 (formato em "U")
Cureta U15/30 dupla (formato em "U")
Descolador Buser
Escavador G duplo
Escavador M duplo
Escavador P duplo
Esculpidor Heidemann 0
Esculpidor Heidemann 1
Esculpidor Heidemann 2
Esculpidor Holembak 3
Esculpidor Discóide Cleóide 1/2 duplo
Esculpidor Discóide Cleóide 3/6 duplo
Esculpidor Discóide Cleóide 89/91 duplo
Esculpidor Holembak 3S
Esculpidor Lecron
Esculpidor Osteo Mitchell
Esculpidor para resina anodizado F4

Esculpidor para resina anodizado F5
Esculpidor para resina anodizado F6
Esculpidor Ward 1
Esculpidor Ward 1

Composição:

Haste - Aço 304 - AISI (Instituto Americano de Ferro e Aço)

Ponta - 420 J2 - AISI (Intituto Americano de Ferro e Aço)

Condições de Armazenamento e Transporte:

Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

Condições de Manipulação:

Todos os instrumentos devem ser tratados com cuidado, enquanto transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Condições de Esterilização:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F (Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

Advertências:

Os instrumentos devem ser esterilizados e limpos antes da utilização. Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção antes da autoclavagem. Os instrumentos com trava devem ser mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

Precauções:

Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:

Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 7020227**

Fabricado por:

MEDISPOREX PVT LTD

Khadim Ali Road, Sialkot

Paquistão

+92 (52) 3554148 / +92 (52) 3255718 / +92 (52) 3553658

www.medisporex.com - info@medisporex.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630006

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870