

AIIPrime dental products



Instruções de Uso

**INSTRUMENTOS
ODONTOLÓGICOS
NÃO ARTICULADOS
NÃO CORTANTES**

INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE AIR ALLPRIME

Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:

Os Instrumentos Odontológicos Não Articulados Não Cortantes Air AllPrime, são embalados individualmente e possui kit que contém 03 instrumentos cada, encontram-se acondicionados em embalagens primárias de Polietileno e posteriormente acondicionados em caixas de papelão, e possuem as seguintes medidas:

Haste – 10 ou 12 cm;

Pontas - Tamanhos variados conforme modelo

Indicação de Uso:

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Modelos Comerciais e Indicações de Uso:

Aplicador de hidróxido de cálcio	Instrumento utilizado para aplicar hidróxido de cálcio na câmara pulpar da preparação.
Brunidor	Instrumento utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, com a finalidade de auxiliar o profissional no acabamento.
Cabo para Espelho	Instrumento Utilizado para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance.
Cureta Gracey	Instrumento utilizado para remover o cálculo da raiz do dente e superfície.

Cureta Sickle	Instrumento utilizado para remover o cálculo a partir da superfície do dente.
Espátula para Fio Retrator Curva	Instrumento utilizado para aplicar o fio de retração entre a preparação e a goma de coroa.
Espátula para Fio Retrator Curva Serrilhada	Instrumento utilizado para aplicar o fio de retração entre a preparação e a goma de coroa.
Pinça Clínica 318	Instrumento utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.
Pinça Clínica Serrilhada	Instrumento utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.
Pinça Clínica Serrilhada com Trava	Instrumento utilizado para manipular aparelhos dentários dentro ou fora da boca com aperto de bloqueio.
Pinça Miller para Carbono	Instrumento utilizado para segurar o carbono no teste de oclusão.
Sonda Exploradora	Instrumento utilizado em procedimentos odontológicos, segundo as técnicas cirúrgicas e/ou a critérios médicos.
Sonda Exploradora Milimetrada	Instrumentos utilizado em procedimentos odontológicos de clínica geral e dentística, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.
Sonda Milimetrada	Instrumento utilizados para medir a profundidade do bolso goma, medidas diferentes.
Cabo para Bisturi nº3	Instrumento usado para fixação de lamina cortante auxiliando o profissional no manuseio da mesma.

Composição:

Haste - Aço 304 - AISI (Instituto Americano de Ferro e Aço)

Ponta - 420 J2 - AISI (Intituro Americano de Ferro e Aço)

Condições de Armazenamento e Transporte:

Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo

sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

Condições de Manipulação:

Todos os instrumentos devem ser tratados com cuidado, enquanto transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Condições de Esterilização:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F (Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

Advertências:

Os instrumentos devem ser esterilizados e limpos antes da utilização. Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção antes da autoclavagem. Os instrumentos com trava devem ser mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

Precauções:

Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e/ou habilitados.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contra-indicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:

Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto

e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

MEDISPOREX PVT LTD

Khadim Ali Road, Sialkot

Paquistão

+92 (52) 3554148 / +92 (52) 3255718 / +92 (52) 3553658

www.medisporex.com - info@medisporex.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630004

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870