

AllPrime *dental products*

Instruções de Uso

LENÇOL DE
BORRACHA

LENÇOL DE BORRACHA ALLPRIME

Dique de Borracha Odontológico

Produto não estéril com reprocessamento proibido.

Apresentação Comercial:

O Lençol de Borracha AllPrime encontra-se disponível em embalagens de 26 unidades, nas dimensões 12,7 x 12,7 cm ou 15 x 15 cm, espessura fina, média ou grossa, cores verde, azul ou preta, apresentando aroma neutro ou menta.

Indicação de Uso:

O lençol de borracha AllPrime é indicado para isolamento absoluto do campo operatório em procedimentos odontológicos, reduzindo a possibilidade de contaminação e de contato dos materiais com a mucosa oral.

Modo de Uso:


Após adequada profilaxia dos dentes a serem tratados, selecionar o grampo de isolamento adequado para o procedimento e montar o lençol de borracha no arco. Demarcar e perfurar o lençol de borracha de acordo com a posição dos dentes a serem isolados. Instalar o conjunto ao dente com o auxílio de pinça porta grampo.

Modelos Comerciais:


- Lençol de Borracha Azul (Fino/Médio/Grosso), 12,7 x 12,7 cm, aroma Menta
- Lençol de Borracha Azul (Fino/Médio/Grosso), 15 x 15 cm, aroma Menta
- Lençol de Borracha Azul (Fino/Médio/Grosso), 12,7 x 12,7 cm, aroma Neutro
- Lençol de Borracha Azul (Fino/Médio/Grosso), 15 x 15 cm,

aroma Neutro

- Lençol de Borracha Verde (Fino/Médio/Grosso), 12,7 x 12,7 cm, aroma Menta
- Lençol de Borracha Verde (Fino/Médio/Grosso), 15 x 15 cm, aroma Menta
- Lençol de Borracha Verde (Fino/Médio/Grosso), 12,7 x 12,7 cm, aroma Neutro
- Lençol de Borracha Verde (Fino/Médio/Grosso), 15 x 15 cm, aroma Neutro

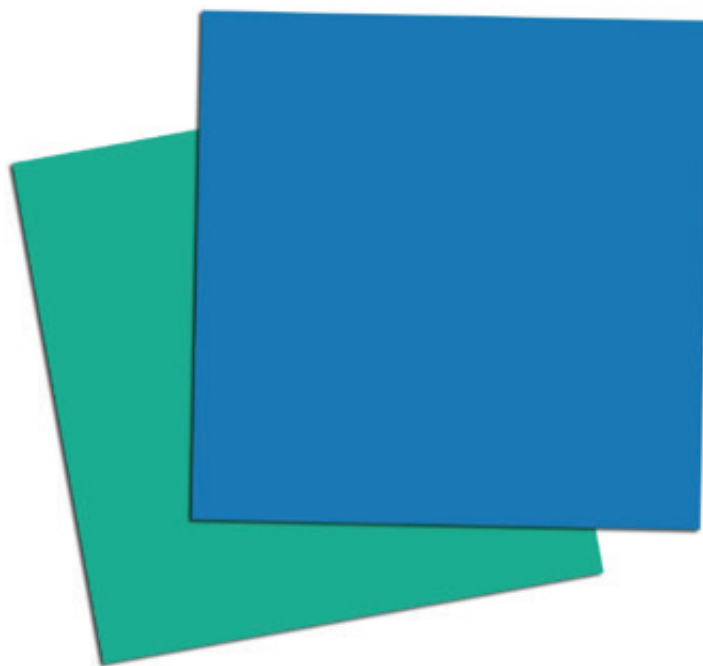

- Lençol de Borracha Preto Médio 12,7 x 12,7 cm, aroma Menta
- Lençol de Borracha Preto Médio 15 x 15 cm, aroma Menta

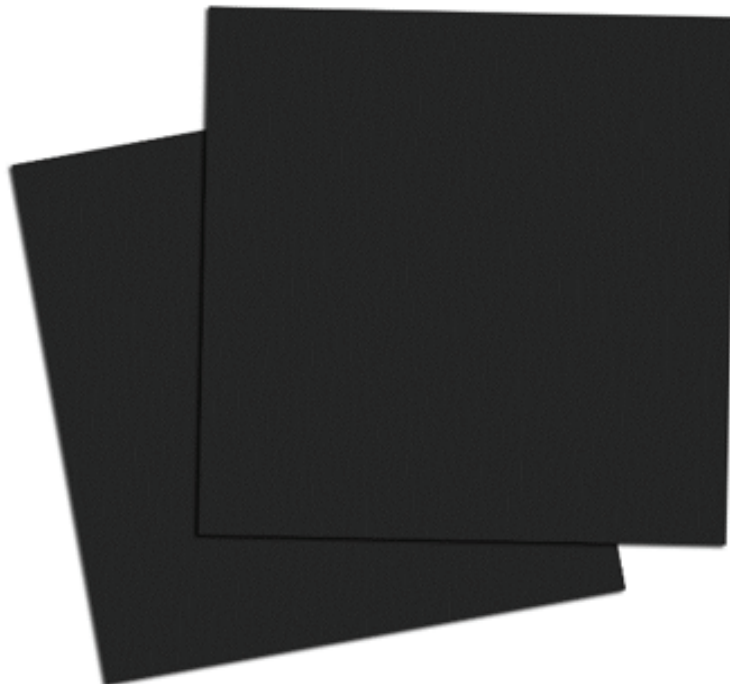

Composição:

Látex natural, pigmentos e óleo de menta.

Condições de Armazenamento, transporte e manipulação:

Os lençóis de borracha devem ser armazenados, transportados e manipulados a uma temperatura máxima de 40°C e protegidos de condições climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV).

Advertências:

Produto não estéril. Proibido reprocessar. Uso profissional.

Precauções:

CONTÉM LÁTEX NATURAL. PODE CAUSAR ALERGIA.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas

contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade:

5 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

SANCTUARY
HEALTH

Sanctuary Health SDN BHD

Persiaran Perindustrian Kanthan 1, nº 16,

Kawasan Perindustrian Kanthan

31200 Chemor, Perak

Malásia

www.sanctuaryhealth.com - info@sanctuaryhealth.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630022

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870