

AllPrime *dental products*

Instruções de Uso

**LIMA
ENDODÔNTICA**

LIMA ENDODÔNTICA ALLPRIME

Lima para Odontologia

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:

A Lima Endodôntica AllPrime é indicada para o preparo manual de ampliação e desbridamento do canal radicular e encontra-se disponível nos seguintes modelos: Lima K, Lima Hedstroem e Lima Flex, e acondicionadas em embalagens com 6 unidades, composta por Blister de poliestireno, nas dimensões 47.0 x31.5 x 8.0 mm (CxLxA).

Indicação de Uso:

As limas endodônticas são indicadas para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para ampliar e tornar a parede lisa e plana do canal radicular através de lixamento e polimento.

Modo de Uso:

As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

Modelos Comerciais:

Lima K



Lima Hedstroem



Lima Flex



Composição:

1. Parte de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo)
2. Haste: polibutileno tereftalato (PBT).

Condições de Armazenamento e Transporte:

Deve ser armazenado e transportado em um lugar fresco e seco, longe de fonte de calor e de umidade.

Condições de Manipulação:

Deve ser manipulado de acordo com os métodos de esterilização indicados e somente por profissionais especializados (dentistas).

Condições de Esterilização:

Esterilização em autoclave com referência às seguintes condições:

1. Temperatura: 121 °C: 20 minutos ou mais.

2. Temperatura: 126 C 15 minutos ou mais.

Advertências:

1. Só dentistas qualificados estão autorizados a usar.
2. Certifique-se de esterilizar este produto para cada uso.
3. Não utilize este produto, exceto para o serviço e tratamento odontológico. Use-o de acordo com o uso pretendido.

Precauções:

1. Para evitar a infecção, esterilize o produto em autoclave e certifique-se de esterilização foi concluída antes de usar
2. Escolha o tipo/modelo mais apropriado para cada caso e seguir o método geral.
3. Antes de usar, fora da cavidade oral, certifique-se que não existem deformações, arranhões e fissuras na lima.
4. Se a cabeça da lima é fina, longa ou grande, há possibilidades de quebrar ou torcer. Devido a isso, certifique-se de avaliar uma angulação racional e evite usar pressão excessiva.
5. Use óculos de segurança para proteger os olhos. Além disso, usar uma máscara protetora de poeira para evitar a inalação de poeira.
6. Proteja o paciente com o uso do lençol de borracha, para evitar queda ou ingestão acidentais.
7. Não utilize este instrumento para quaisquer fins, exceto para aplicativos listados acima.
8. Somente para uso por profissionais dentistas.
9. Este produto deve ser tratado como lixo médico quando descartado.
10. Descarte o produto se estiver danificado ou contaminado.
11. Após o uso, lave-o com escova e detergente/desincrustante profissional apropriado. A fim de retirar substâncias estranhas como fluidos e tecido corporais aderidos ao instrumento após cada utilização.

12. Em caso de desinfecção e limpeza através de equipamento ultrassônico, use o processo padrão adequado para evitar deterioração/desgaste da área de corte/fio da lima.
13. Use este produto com muito cuidado para evitar a perfuração dos dedos, pois a lima contém área/ponta afiada.
14. Existe risco de corrosão da lima em imersão por um período prolongado em NaOCl, EDTA ou outra substância.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade:

Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

MANI HÁ NOI CO.,Ltd. (MHC)

Tan Huong, município Pho Yen, na Província de Thai Nguyen
Vietnã

(84-280)37637000

www.mani.co.jp/pt/index.html - info@washinengine.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630001

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870