

AIIP *dental products*
Prime

Instruções de Uso

AGULHA GENGIVAL

Agulha Gengival AllPrime

Agulha Gengival Descartável

Apresentação Comercial:

A embalagem primária é de papel cartonado contendo 100 unidades de agulhas gengivais acondicionadas em invólucro protetor de polipropileno.

As agulhas gengivais AllPrime são comercializadas sob calibre 30 G, em tamanhos Extra Curta (16mm), Curta (21mm), Média (25mm) e Longa (30mm) e calibre 27 G, no tamanho Longa (30mm).

Indicação de Uso:

A Agulha Gengival AllPrime é indicada para a administração de anestésicos na região gengival. Sua indicação é dependente do calibre das agulhas e pode ser enquadrada da seguinte forma:

- Calibre 30G Extra Curta: indicada para procedimentos de odontopediatria, periodontia e anestesia superficial da gengiva;
- Calibre 30G Curta/Média: indicada para procedimentos de anestesia odontológica, com exceção de procedimentos anestésicos tronculares;
- Calibre 27G Longa: indicada para procedimentos de anestesia troncular, para pacientes com mandíbulas grandes ou para introdução de hidróxido de cálcio;
- Calibre 30G Longa: indicada para procedimentos de anestesia condutiva e de infiltração.

Modo de Uso:

1. Para rompimento do lacre, segure firmemente as duas extremidades do protetor de agulha, girando-as em sentido contrário. Não utilize a Agulha Gengival AllPrime caso o lacre já esteja violado.
2. Retire o protetor do canhão da agulha, de maneira retílinea, de modo a evitar dobrar ou danificar a agulha.

3. Encaixe a agulha na seringa carpule, rosqueando-a em sentido horário.

4. Remova o protetor da agulha apenas no momento da aplicação.

Modelos Comerciais:

Calibre 30 G

Cód. 9889740: Extra Curta (16mm)

Cód. 9889741: Curta (21mm)


Cód. 9889742: Média (25mm)

Cód. 9889743: Longa (30mm)



Calibre 27 G

Cód. 9889744: Longa (30mm)

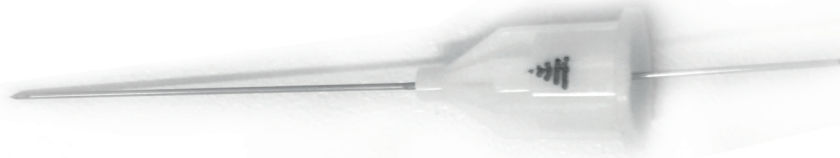

Composição:

- Protetor da agulha: Polipropileno virgem para injeção de grau médico;
- Agulha (cânula): Aço Inoxidável AISI 304

Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação:

As agulhas gengivais devem ser armazenadas, transportadas e manipuladas em ambientes com umidade variando de 50-60% e a uma temperatura entre 15-25°C e protegidos de condições climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV).

Advertências e Precauções:

1. Produto Estéril.
2. Artigo médico-hospitalar de uso único. Descartar após o uso.
3. Não utilizar o produto em caso de embalagem violada.
4. Após sua utilização, as agulhas gengivais devem ser descartadas apropriadamente em descarte de material pérfuro-cortante.
5. Atentar aos procedimentos de manipulação das agulhas gengivais, a fim de evitar riscos de contaminação ou acidentes.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:

5 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

C-K DENTAL IND. CO., LTD.

88-50, SUDO-RO, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO

Coréia do Sul

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630047
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870