

NOME COMERCIAL

Tira Abrasiva de Aço Airon

APRESENTAÇÃO

125 mm x 4,0 mm x 0,12 mm;

125 mm x 6,0 mm x 0,12 mm.

INDICAÇÃO DE USO

A Tira Abrasiva de Aço Airon tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais. Indicada para todos os tipos de materiais restauradores como compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama.

COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável, óxido de alumínio e níquel.

MODO DE USO

Inserir cuidadosamente a Tira Abrasiva de Aço no espaço interproximal do dente, através do centro neutro e promover o desgaste ou polimento da região tratada.

ADVERTÊNCIAS

Utilização restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme legislação local e com treinamento específico para a sua manipulação.

Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos no modo de uso.

Fabricante recomenda uso único. Descartá-lo após o uso.

PRECAUÇÕES

Manipular o produto de forma cuidadosa para não promover lesões nos tecidos moles da cavidade oral do paciente.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Manter fora do alcance de crianças.

CONTRAINDICAÇÃO

Não utilizar em pacientes com sensibilidade a algum de seus componentes.

EFEITO ADVERSO

Não aplicável.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Armazenar a embalagem em local limpo e ao abrigo da luz solar direta. Temperatura entre 3 °C a 50 °C e umidade até de 75 UR.

MODO DE DESCARTE

O produto deve ser descartado conforme a legislação vigente de seu país.

DIZERES LEGAIS

Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.

Endereço: Av. Melvin Jones, 773 – Pq. Industrial Bandeirantes | Maringá – Paraná, Brasil

CEP: 87070-030

Responsável Técnico: Kellen Soraya Pacetti Dib de Campos

CRF-PR 15.807

Reg. ANVISA: 80322400077

SIMBOLOGIA

	Consulte as Instruções de Uso
	Número de lote
	Manter longe da luz solar
	Atenção, leia a Instrução de Uso
	Data de validade
	Fabricante
	Limites de temperatura
	Número de catálogo