

AllPrime *dental products*

Instruções de Uso

MICROAPLICADOR

MICROAPLICADOR

Aplicadores

Produto não estéril de uso único – reprocessamento proibido.

Apresentação Comercial:

Os microaplicadores são acondicionados em embalagens primárias de tubos de Poliestireno, nos formatos Extra Fino, Fino e Regular. As embalagens secundárias são caixas de papel, contendo quatro tubos de Poliestireno cada uma.

Disponível nas cores: Branco, Roxo, Azul, Amarelo, Verde e Laranja, cada tubo possui 100 unidades cada, nas dimensões 102 mm Ø 3,2.

Indicação de Uso:

É indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitários.

Modo de Uso:

Retire uma haste da embalagem e dobre a ponta aplicadora no ângulo mais adequado para chegar à área que deve ser tratada. Carregue a ponta aplicadora com o produto a ser aplicado. Leve o produto para a área a ser tratada e aplique fazendo leve fricção. Não utilizar a mesma haste para aplicação de produtos distintos. Descarte a haste após usar.

Modelo:



Composição:

Haste de polipropileno. Cerdas em fibras.

Condições de Armazenamento e transporte:

Manter o produto em sua embalagem original sempre fechada em temperatura ambiente, local fresco e seco. Proteger contra a luz solar.

Condições de Manipulação:

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas.

Advertências:

Para uso profissional. O fabricante recomenda uso único.
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas

contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:

2 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

Lakong Medical Devices Co., Ltda.,
Rua: Shicong Industrial Park, Shipai, 523345
Dongguan - Guangdong
<http://lakong.medincn.com/>

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630012
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870