

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MOCHOS
Premium /
Professional / Professional II /
Standard / Standard Fit



APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

Nome Técnico: Mocho Odontológico

Nome Comercial: Mocho Odontológico

Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit

Fornecedor / Fabricante:

Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica

C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114

Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500

Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

Telefone +55 (16) 3512-1212

Responsável Técnico: Daniel R. de Camargo

CREA-SP: 5062199650

ATENÇÃO

Para maior segurança:

Leia e entenda todas as instruções contidas nestas instruções de uso antes de instalar ou operar este equipamento.

Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas por todos os operadores deste equipamento.

ÍNDICE

02 APRESENTAÇÃO DO MANUAL

04 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

05 Descrição do Equipamento

06 MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

09 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

09 Características gerais

10 Simbologias da embalagem

11 Dimensional

16 OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

19 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

19 Recomendações para a conservação do equipamento

19 Condições de transporte, armazenamento e operação

19 Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento

20 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

20 Procedimentos adicionais para reutilização

20 Limpeza geral

20 Desinfecção

20 Manutenção Preventiva

20 Manutenção Corretiva

21 GARANTIA DO EQUIPAMENTO

21 CONSIDERAÇÕES FINAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Prezado Cliente

Parabéns pela excelente escolha. Pode ter certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível com os melhores do mundo em sua classe.

Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Técnico: Mocho Odontológico

Nome Comercial: Mocho Odontológico

Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit



Premium



Professional



Professional II



Standard



Standard Fit

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Descrição do equipamento

Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições.

Apoio para os pés ajustável, possibilitando melhor posição no campo operatório e facilitando a hemodinâmica*.

Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto são acionados através de manípulo*, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão ou aro.

Encosto com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional proporcionando mais conforto*.

Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade.

Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Permite mais conforto para o profissional e é de fácil limpeza e assepsia.


Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores*, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja, permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural.

Para garantir um funcionamento seguro de seu equipamento, utilize somente as configurações de montagem (Cadeira, Equipo, Unidade de Água e Refletor) fornecidas pela Revenda / Assistência Técnica Autorizada.

* Verificar modelo adquirido.


MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Mocho Premium

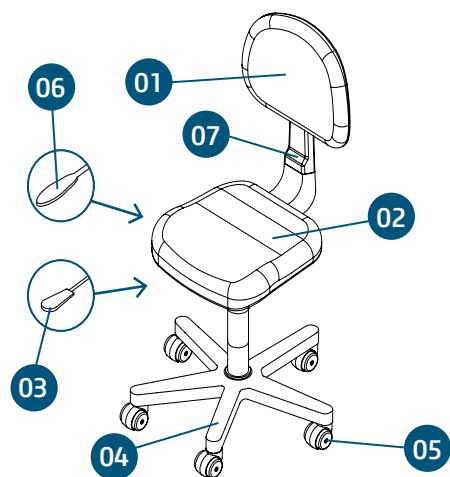

- 01 - Encosto
- 02 - Assento
- 03 - Alavanca regulagem altura do assento
- 04 - Base
- 05 - Rodízio
- 06 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
- 07 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)


Mocho Professional

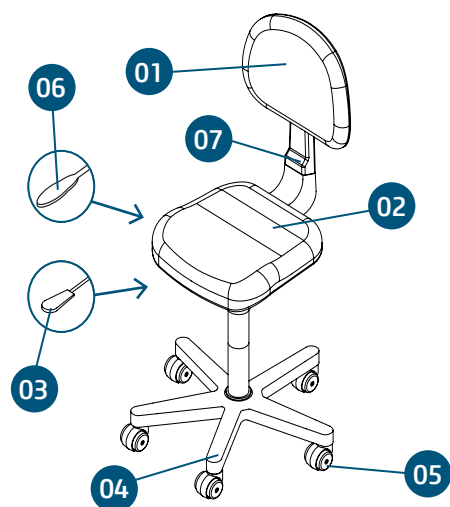

- 01 - Encosto
- 02 - Assento
- 03 - Alavanca regulagem altura do assento
- 04 - Base
- 05 - Rodízio
- 06 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
- 07 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)


MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Mocho Professional II

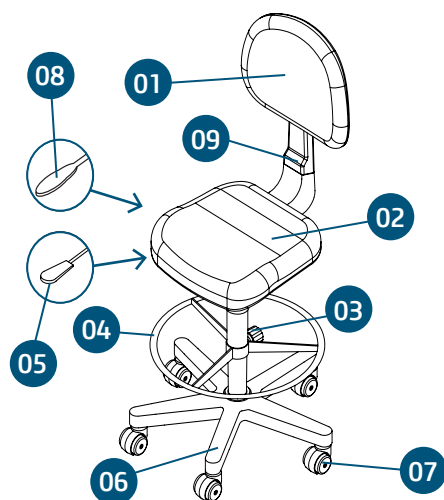

- 01 - Encosto
- 02 - Assento
- 03 - Regulagem altura aro
- 04 - Aro de apoio para os pés
- 05 - Alavanca regulagem altura do assento
- 06 - Base
- 07 - Rodízio
- 08 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
- 09 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)


Mocho Standard

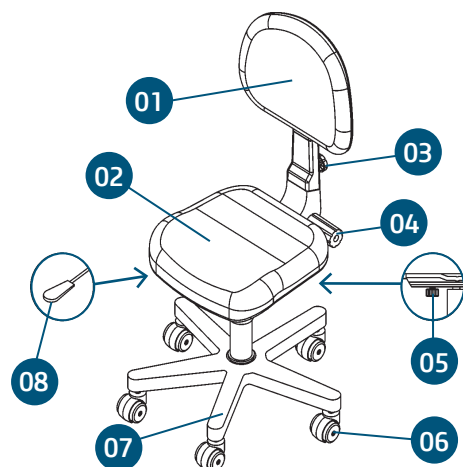

- 01 - Encosto
- 02 - Assento
- 03 - Regulagem altura do encosto
- 04 - Regulagem inclinação do encosto
- 05 - Regulagem horizontal do encosto
- 06 - Rodízio
- 07 - Base
- 08 - Alavanca regulagem altura do assento

MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Mocho Standard Fit

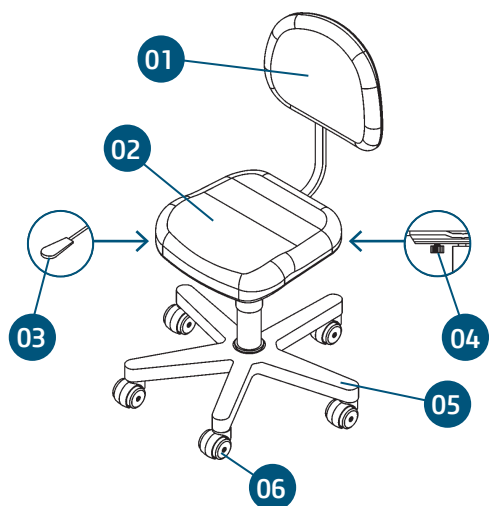

- 01 - Encosto
- 02 - Assento
- 03 - Alavanca regulagem altura do assento
- 04 - Regulagem horizontal do encosto
- 05 - Base
- 06 - Rodízio



NOTA: Estofamentos laminado PVC, couro ou ultraleather, disponíveis em diversas cores*

* Verificar modelo adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características gerais

Mocho Premium

Peso Líquido
7,6 Kg
Peso Bruto
9,8 Kg
Capacidade de Carga
135,0 Kg

Mocho Professional

Peso Líquido
7,6 Kg
Peso Bruto
9,8 Kg
Capacidade de Carga
135,0 Kg

Mocho Professional II

Peso Líquido
8,8 Kg
Peso Bruto
11,4 Kg
Capacidade de Carga
135,0 Kg

Mocho Standard

Peso Líquido
6,6 Kg
Peso Bruto
9,2 Kg
Capacidade de Carga
135,0 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Standard Fit

Peso Líquido

5,6 Kg

Peso Bruto

7,6 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Simbologias da embalagem



Empilhamento máximo, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser empilhada durante o transporte e armazenamento “conforme embalagem”.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos d'água ou piso umedecido).




Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz.



Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos).

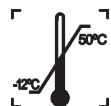


Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)


Mocho Premium

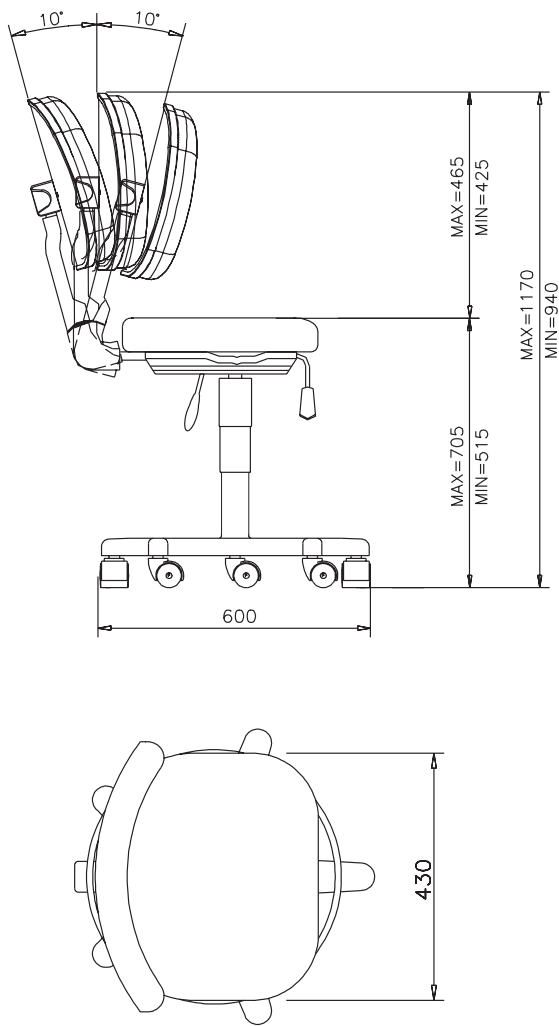

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)


Mocho Professional

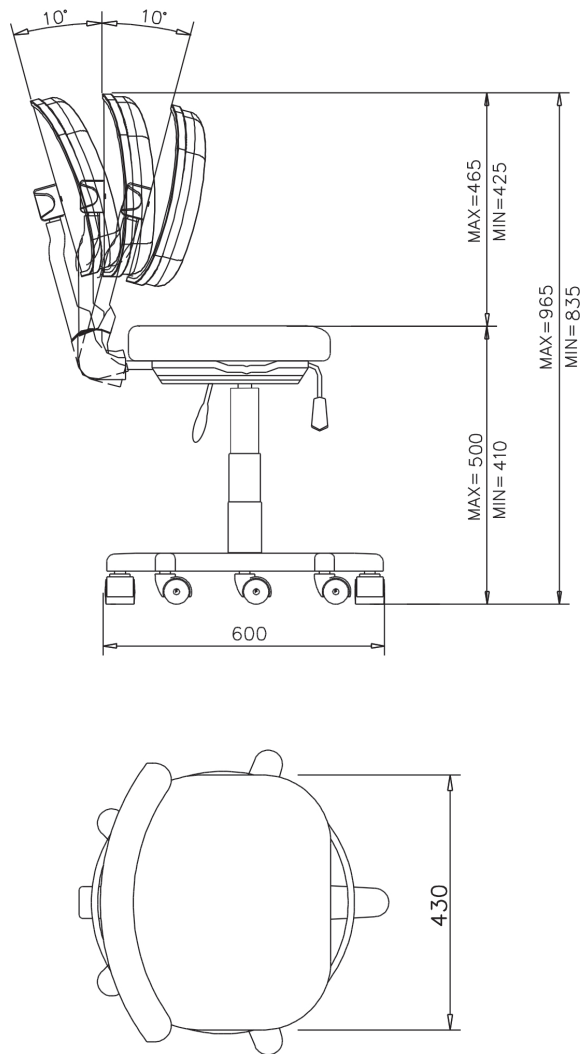

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)


Mocho Professional II

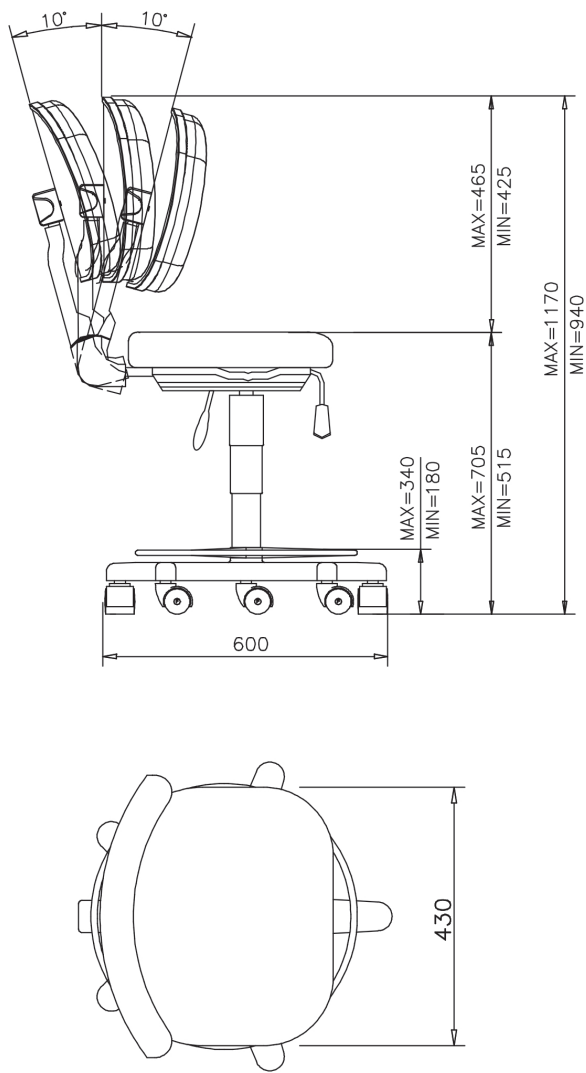

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)



Mocho Standard

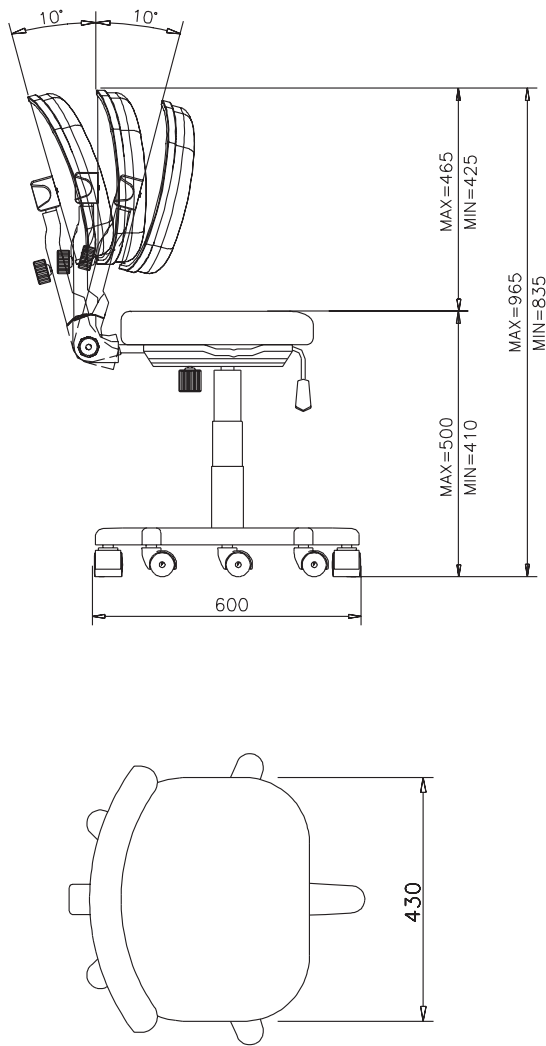

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)

Mocho Standard Fit

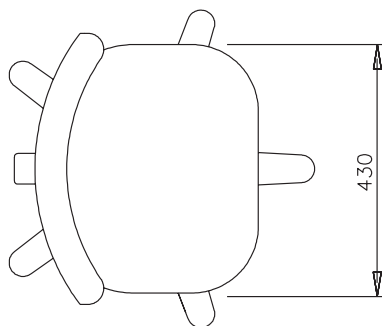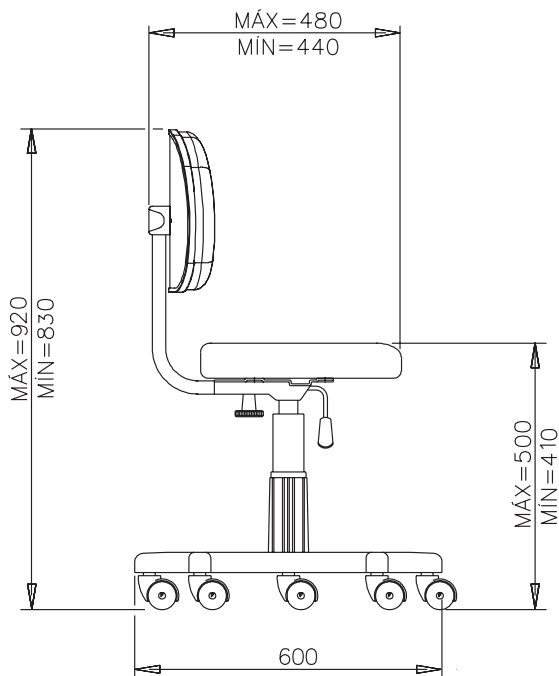


OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Regulagem do assento (Todos os modelos)

SUBIR: Suspenda o corpo e, com um leve toque para cima na alavanca (01), o assento subirá automaticamente. Solte a alavanca na altura desejada.


DESCER: Sente no centro do mocho e, com um leve toque para cima na alavanca (03), o assento descenderá com o peso de seu corpo (mínimo 50Kg). Solte a alavanca na altura desejada.

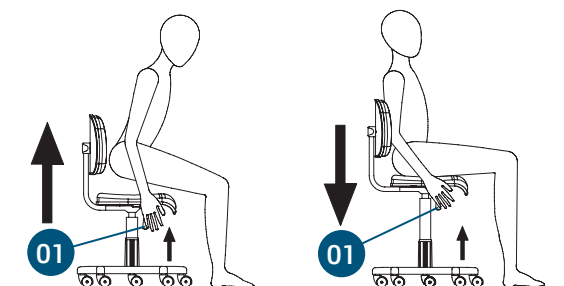

Regulagem do encosto (Premium / Professional / Professional II)

VERTICAL: O ajuste da altura do encosto é feito manualmente (sistema catraca) (02), basta puxá-lo e soltar na posição desejada.

HORIZONTAL: Acione a alavanca (03) e ajuste a inclinação do encosto na posição desejada.

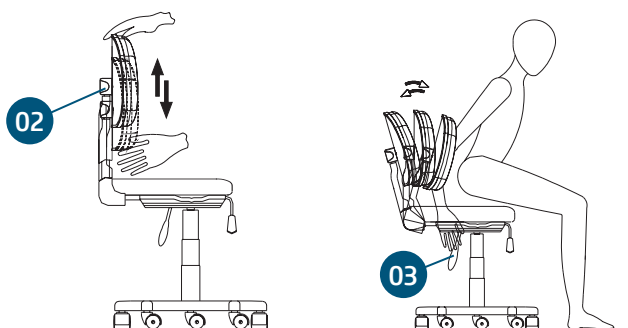


OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Regulagem do encosto (Standard)

VERTICAL: Solte o manípulo de fixação (04), deslize o encosto ajustando-o na posição desejada e aperte o manípulo.


HORIZONTAL: Solte o manípulo de fixação (05), deslize o encosto (06) ajustando-o na posição desejada e aperte o manípulo.

INCLINAÇÃO: Sente no centro do mocho e solte o manípulo (07), ajuste o encosto na posição desejada e aperte o manípulo.

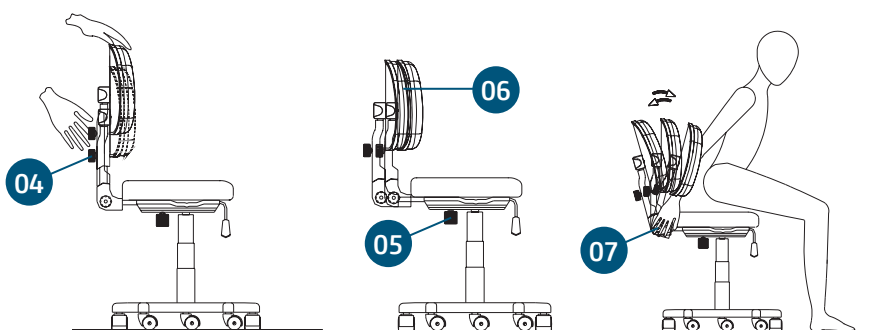

Regulagem do encosto (Standard Fit)


HORIZONTAL: Solte o manípulo de fixação (08) e deslize o encosto (09) ajustando-o na posição desejada.

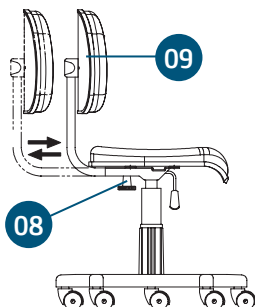

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Regulagem do apoio para os pés (Professional II)

Para uma hemodinâmica perfeita, quando o mocho estiver com sua altura elevada, é recomendado o uso do apoio para os pés. Para ajustar a posição do apoio, solte o manípulo (10) e ajuste na posição desejada.

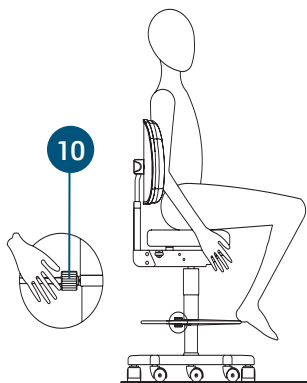

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Recomendações para a conservação do equipamento

Seu equipamento foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. Todos aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos motivos e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

Condições de transporte, armazenamento e operação

O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:

- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.



Atenção

O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento



Cuidados para a limpeza dos Estofamentos (laminado PVC "courvin", couro ou ultraleather)
Jamais utilizar qualquer tipo de álcool, material microabrasivo, detergentes que contenham solventes tais como éter ou tira manchas para limpeza dos estofamentos, pois isto poderá provocar manchas.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em laminado PVC (courvin) ou ultraleather:

- Recomendamos o uso de um pano umedecido em água com sabão neutro.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em couro:

- Para limpeza e hidratação dos estofamentos em couro, recomendamos a utilização de produtos exclusivos para este fim.
- Nunca molhe ou esfregue rigorosamente o couro. Caso caia sujeira sobre o couro que venha a manchá-lo, limpe-o imediatamente com um pano umedecido em água com sabão neutro.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Procedimentos adicionais para reutilização

O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

Limpeza geral

Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de que o equipamento esteja desligado da rede elétrica.



Atenção

- Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos que ao efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo.
- Para efetuar a limpeza do equipamento utilize um pano umedecido em água com sabão neutro. A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.

Desinfecção

- Para efetuar a desinfecção do equipamento utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70%. (exceto para os estofamentos).
- Nunca utilize desinfetantes corrosivos ou solventes.



Advertência

De modo a prevenir contaminação, utilize luvas e outros sistemas de proteção durante a desinfecção.

Mesmo que, durante os procedimentos, as luvas sejam utilizadas, após a retirada das luvas as mãos devem ser lavadas.

Manutenção Preventiva

O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do país. Mais nunca com período superior a 3 anos.

Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica autorizada para revisões periódicas de manutenção preventiva.

Manutenção Corretiva

Declaramos que o fornecimento de diagramas de circuitos, listas de componentes ou quaisquer outras informações que propiciem assistência técnica por parte do usuário, poderão ser solicitadas, desde que previamente acordado, entre este e a Empresa fabricante.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO

Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de Garantia que acompanha o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças.

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante.

Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho.

Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento: + 55 (16) 3512-1212.

