


# INSTRUÇÕES RÁPIDAS

## COMO USAR SUA AUTOCLAVE VITALE 54L CLASSE B



**01** Após realizar o Desbloqueio, o equipamento está pronto para o uso.

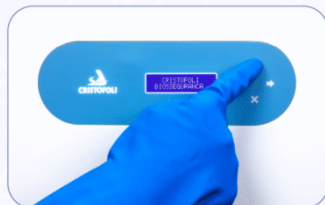


**02** Para ligar a autoclave, conecte o cabo de energia à rede elétrica, ative o disjuntor e pressione a tecla início. O display exibirá as informações iniciais.



**03** Serão exibidas mensagens demonstrando a necessidade do monitoramento em cada carga e diária, conforme exigência da RDC 15. Pressione qualquer tecla para continuar a operar o equipamento.



**04** Abra a porta puxando-a e coloque os materiais a serem esterilizados na autoclave. Verifique se o reservatório de abastecimento possui a quantidade suficiente de água destilada para iniciar um programa de esterilização.

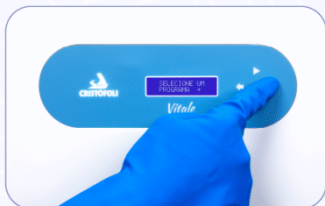

**05** Feche a porta da autoclave e selecione o programa desejado pressionando as teclas ← →. Pressione a tecla início e empurre a porta segurando-a, será exibida a mensagem **TRAVANDO A PORTA**.



**06** Assim que a temperatura e pressão ideais para o início da esterilização forem atingidas, o display alternará entre as mensagens **ESTERILIZANDO, TEMPO RESTANTE** e **TEMPO DECORRIDO**. A etapa de esterilização iniciará.



**07** Ao término da esterilização, o display exibirá a mensagem **DESPRESSURIZANDO. A secagem acontecerá automaticamente, com a porta fechada, e o display alternará entre as mensagens SECANDO, TEMPO RESTANTE** e **TEMPO DECORRIDO**.



**08** Ao final da secagem, a autoclave exibirá a mensagem **ABRA A PORTA!**, a porta será destravada automaticamente para acelerar o resfriamento, e será exibida a mensagem **ESFRIANDO**.



**09** Após o término deste processo, a autoclave emitirá 7 bips e o display exibirá a mensagem **CICLO CONCLUÍDO**.



**10** Se o pen drive já estiver conectado, o display exibirá a mensagem **TRANSFERINDO DADOS**, caso contrário, exibirá **CONECTE PEN DRIVE OU PRESSIONE X**, para cancelar a gravação.



**11** Para voltar ao modo de seleção de programa, pressione a tecla Cancela. Para desligar o equipamento, pressione a tecla Cancela por 2 segundos.

## ATENÇÃO

- ✓ A autoclave é um equipamento para esterilização a vapor, trabalha com temperatura e pressão elevadas. Deve ser manuseada por profissionais capacitados e mantida em local de acesso controlado.
- ✓ Realize a manutenção preventiva na autoclave conforme especificado no manual de instruções.
- ✓ Realize os testes biológicos:
  - Após a instalação, no primeiro uso.
  - Rotina (semanal ou de acordo com a legislação do seu estado ou município para o seu tipo de serviço).
  - Após manutenção preventiva ou corretiva.
- ✓ Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

### Dica

✓ Utilize o Suporte para Envelopes que otimiza a capacidade da autoclave, proporcionando uma esterilização eficiente e secagem perfeita do material, além da economia de energia elétrica, tempo e água destilada.

A instalação e o desbloqueio deste equipamento deverão ser realizados pela rede de Assistência Técnica Autorizada.



✉ cristofoli@crstofoli.com



Blog Biossegurança: [www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)  
Consultoria gratuita em biossegurança

**Cristófoli,**  
a marca da proteção.