

LIGADURAS ELÁSTICAS

COMO ESTERILIZAR?

As ligaduras NÃO devem ser esterilizadas por estufa ou autoclave, pois isso compromete suas propriedades elásticas e estéticas, então restam apenas os meios químicos.

Sugerimos duas formas de desinfecção:

1 Álcool 70%

- Mergulhar as ligaduras no álcool, garantindo que toda a superfície seja atingida;
- Retirar e deixar secar à temperatura ambiente.

2 Glutaraldeído 2%

- Diluir o produto em água na proporção de (1:3), o que resulta numa concentração aproximada de 0,7%;
- Mergulhar as ligaduras e deixar agir por 10 minutos;
- Enxaguar bem em água, e deixar secar à temperatura ambiente.

Maiores concentrações ou tempos de exposição não devem ser utilizados em nenhum dos produtos, pois podem comprometer propriedades elásticas e estéticas das ligaduras.

O enxague do Glutaraldeído é um passo importante, e deve ser bem feito, para evitar que seus resíduos cheguem ao paciente.