




Guia Rápido para o Motor elétrico MF-100


Colocação em funcionamento – Geral

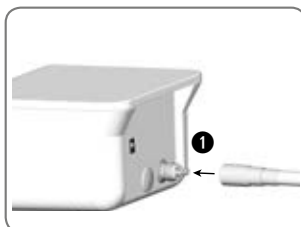


- ❶ Parafusar o tubo de alimentação (de acordo com a norma ISO 9168 tipo 3) da unidade dentária.

Atenção à posição!


Opcional: Adaptador para conexão de 2(3) furos Borden

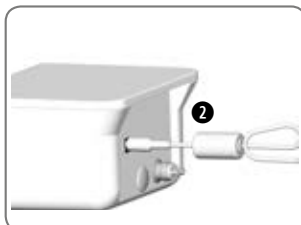

- ❷ Ligue a fonte de alimentação ao dispositivo médico.

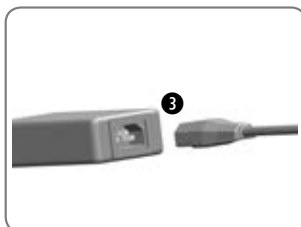

- ❸ Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

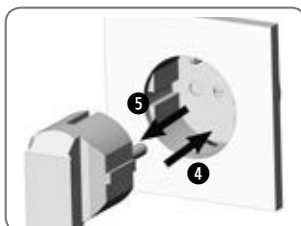

- ❹ Conecte o cabo de alimentação somente em tomadas com aterramento. [90 – 264 V CA, 47 – 63 Hz].

- ❺ Retire o conector de alimentação da tomada.




- ❻ Encaixe o motor.



Certifique-se de que o dispositivo médico a qualquer momento possa ser desligado da rede elétrica.

Operação MF – 100

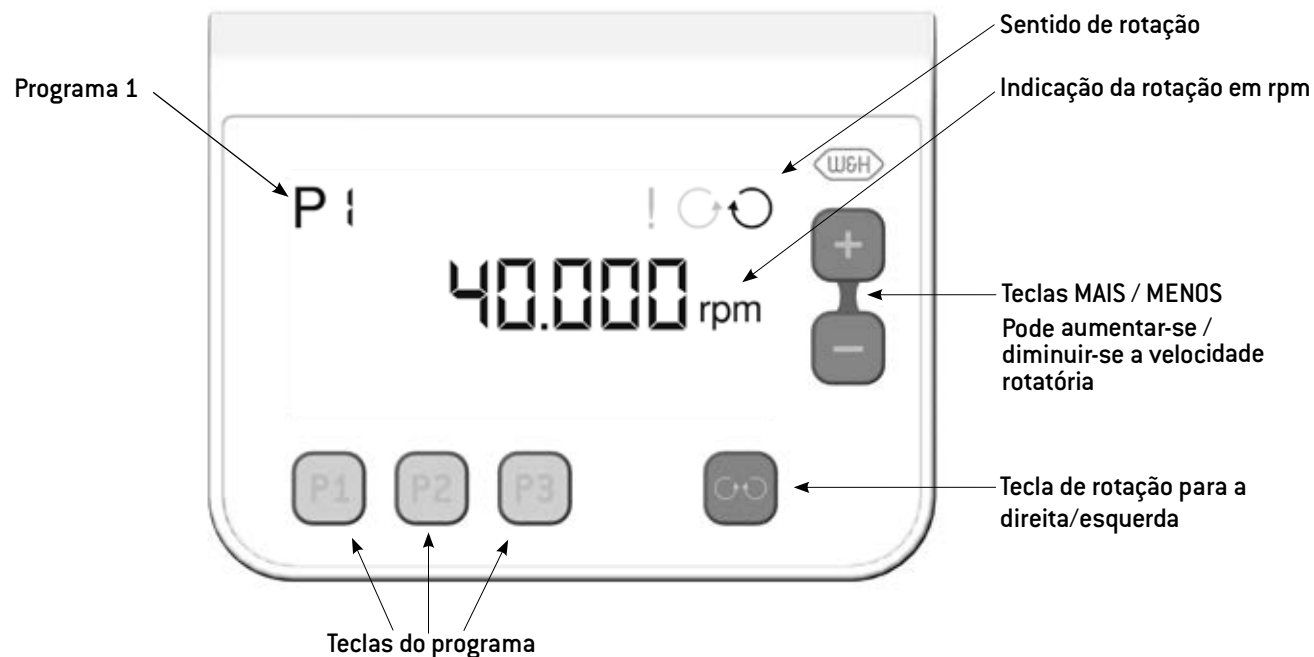

Teclas do programa	> Mudança de programa > Guardar como programas individuais Velocidade do motor desde 2.000 - 40.000 rpm
Rotação para a direita/esquerda	Comutação de rotação da direita para a esquerda Configuração original = Rotação para a direita
Consulte a instruções de uso MF-100	

Guia Rápido para o Motor elétrico MF-100

Possibilidades de montagem flexíveis e acessórios



Add-on

Se utilizar o Add-on como aparelho de mesa, o tabuleiro esterilizável oferece uma superfície de suporte adicional.



Mostrador amovível

O mostrador pode ser retirado do Add-on e instalado independentemente do módulo de comando.




Opção de montagem

Também pode montar o Add-on debaixo ou lateralmente na mesa da sua unidade dentária.




Cabos
(Comprimento cabo 70 cm)

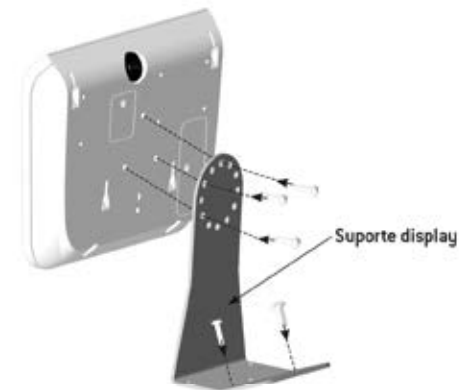


Fixação de mangueiras

para unidades dentárias com sistema de chicotes

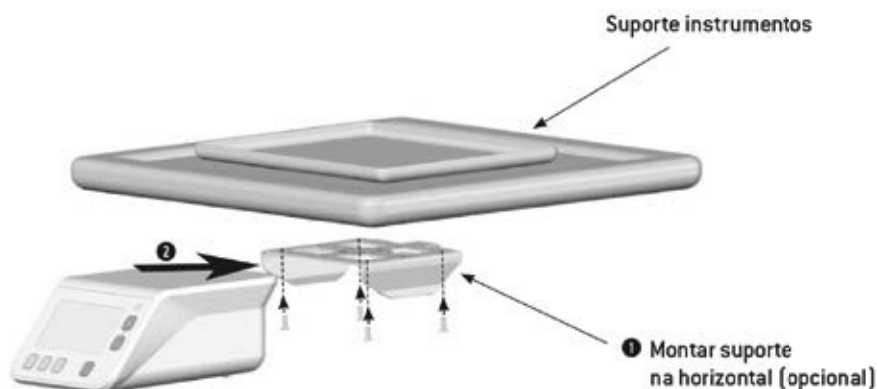

1 Montar suporte na horizontal (opcional)

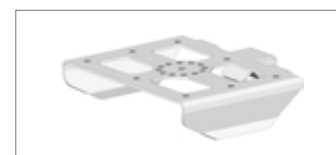

07842200

Suporte
com kit de parafusos



07944590

Bandeja



02039900

Adaptador para
ligação de 2(3) furos Borden



07712700

Suporte display
com kit de parafusos