

## EUGENOL

### INDICAÇÃO DE USO

O Eugenol pode ser utilizado como curativo para hiperemias pulpare e pulpites dadas suas qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas. É ainda muito empregado na conhecida pasta de óxido de zinco-eugenol para forrar cavidades, obturar canais, curativos em alvéolos.

### MODO DE USO

Cimento de Óxido de Zinco – Eugenol

Colocar em uma placa de vidro lisa, no máximo 2 a 3 gotas de EUGENOL e ir acrescentando o Óxido de Zinco, espatulando até obter a consistência desejada.

### COMPOSIÇÃO

Eugenol (óleo de cravo)

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar o produto em local seco e arejado sem grandes variações de temperatura.

Evitar locais úmidos, descobertos, expostos a luz e ao calor, pois podem sofrer deterioração de cor e cheiro.

### ADVERTÊNCIAS

Uso Profissional

Não estéril

Descartar após o uso

### PRECAUÇÕES

Não Aplicável

RUA MARQUÊS DE PRAIA GRANDE, 95 – VILA PRUDENTE  
CEP: 03129-110 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
CNPJ: 60.397.965/0001-91 – I.E.: 103.155.869.115  
FONE / FAX: (11) 2966-5377 / 2966-5510  
EMAIL: [qualidade@lysanda.com.br](mailto:qualidade@lysanda.com.br)



#### CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes da formulação.

RUA MARQUÊS DE PRAIA GRANDE, 95 – VILA PRUDENTE  
CEP: 03129-110 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
CNPJ: 60.397.965/0001-91 – I.E.: 103.155.869.115  
FONE / FAX: (11) 2966-5377 / 2966-5510  
EMAIL: [qualidade@lysanda.com.br](mailto:qualidade@lysanda.com.br)

