

INSTRUÇÕES DE USO

BANDA MATRIZ

Matriz Odontológica

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Banda Matriz de Aço AF do BRASIL possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. Utilizado Aço Inox de Alta Qualidade.

2. APRESENTAÇÃO

Estojo plástico contendo 50cm de BANDA MATRIZ nas dimensões 0,05mm x 5mm, com 50cm de comprimento e 0,05mm x 7mm, com 50cm de comprimento.

3. COMPOSIÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicadas para que se faça o envolvimento do dente, substituindo assim uma ou mais paredes do dente durante o processo de restauração. São de fácil aplicação, pois são rígidas o suficiente para que não haja o descolamento durante a condensação do amálgama e é de fácil remoção de forma com que não danifique a restauração. São indicadas para reconstrução dental de dentes posteriores nos dentes que foram destruídos por processo cariogênico.

5. AÇÃO DO PRODUTO

A BANDA MATRIZ não exerce ação, elas são utilizadas como auxiliares do tratamento ortodôntico.

A finalidade das bandas é promover uma superfície mais regular no dente e servir como ponto de apoio para a aplicação de outros produtos utilizados no tratamento ortodôntico. Os bráquetes, tubos, botões fios ou arcos podem ser soldados nas bandas, facilitando e auxiliando a construção do aparelho ortodôntico.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- ESTERILIZAR antes de usar;
- Cortar a fita matriz no tamanho desejado;
- Fazendo o uso do porta matriz introduzir a matriz no dente e fazer o ajuste;

- Remova a fita matriz depois de concluída a restauração;
- A BANDA MATRIZ deve ser descartada após a sua utilização; caso a mesma seja reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma insatisfatória.

8. CONTRAINDICAÇÕES

Em sua aplicação correta, feita por um profissional da área odontológica com especialização em ortodontia, não apresenta contraindicações.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Em caso de reação alérgica suspender o uso;
- Não Reutilizar;
- Produto não estéril.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Esterilizar antes do uso, conforme instruções de uso do produto;
- Deve ser usado somente por profissionais da área devidamente habilitados;
- Considera-se que a banda matriz de qualquer tipo deve ser descartada após a sua utilização. Caso a mesma seja reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma insatisfatória.

11. MANIPULAÇÃO

Após o uso manter a embalagem bem fechada, somente para o uso odontológico.

12. INTERAÇÕES:

Não há.