


PONTAS DIAMANTADAS FG KITS INVICTA®

Kits de práticas odontológicas com a melhor ponta diamantada do Brasil, acompanhadas de broqueiro exclusivo American Burrs.



KIT INVICTA® FACETAS LAMINADAS

 06 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas necessárias para procedimentos de Facetas Laminadas.

 FG1013

Delimitação do preparo na cervical e nas proximais.

 FG4138

Confecção de sulcos de orientação vertical, pro desgaste da incisal. Dependendo da espessura do preparo, você pode aprofundar mais ou menos a ponta.

 FG4141

Sulcos de orientação horizontais na face vestibular com menos espessura.

 FG4142

Sulcos de orientação horizontais na face vestibular, com maior espessura.

 FG2135F

União de sulcos de orientação, que também pode ser realizada com a FG4138, o que muda é o poder de corte das duas pontas.

 FG2135FF

Está indicada para o refinamento do preparo.



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010


Rotação:

190.000 a 300.000 RPM


SAIBA MAIS



KIT INVICTA® PRÁTICAS DIÁRIAS

 16 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas mais utilizadas nas rotinas clínicas diárias.

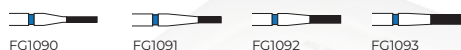

Preparos internos de restaurações indiretas ou diretas, quando necessário.



Indicada para faces livres.



Preparo de coroas ou facetas que necessitam de mais espessura.



Indicada para preparos internos de cavidade.



Preparo da face palatina.



Acesso às lesões e remoção de restaurações.



Preparos de laminados ou coroas.



Preparo de indireta em dentes posteriores.



Também conhecida como carretel, indicada para remoção de restaurações de amálgama.



Indicada para romper as proximais, quando envolvidas no preparo.



Preparo em faces livres.

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

KIT INVICTA® INLAY E ONLAY

 10 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas necessárias para Preparo Inlay e Onlay ou técnicas que necessitem de expulsividade e cantos arredondados



Acesso ou remoção de restaurações. Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.



Operações em esmalte, dentina e preparação de cavidades.



Obtenção de paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta.



Indicada para preparos internos de cavidade.



Preparo de indireta em dentes posteriores.



Indicada para preparo de Inlay / Onlay.



Confecção de sulcos de orientação vertical e união de sulcos de orientação.



Recomendada para confecção de paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta.



Acabamento e Polimento de todos os materiais dentários.

Broca Multilaminada 30 Lâminas Invicta®

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:


81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

KIT INVICTA® RESTAURAÇÕES INDIRETAS

 10 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas indicadas para Preparo de Cavidades em Dentística e Prótese.



 FG1014

Acesso ou remoção de restaurações. Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.

 FG2131

Preparo de indiretas em dentes posteriores devido ao seu formato expulsivo.

 FG2135

Preparo de facetas cerâmicas.

 FG2200

Rompimento da face proximal dos preparos, quando indicada.

 FG3131

Preparo de indireta em dentes posteriores, também devido ao formato expulsivo.

 FG3168

Preparo da face palatina em dentes anteriores.

 FG4137

Preparo de indireta em dentes posteriores, devido ao formato expulsivo. Em regiões com uma profundidade maior.

 FG4138


Preparo de coroas ou facetas que necessitam de mais espessura.

 FG2135F

Acabamento dos preparos.

 FG3168F

KIT INVICTA® ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURAÇÕES

 7 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas necessárias para a Finalização da Restauração com Resinas Compostas



 FG1190FF

 FG1190F

Acesso ou remoção de restaurações. Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.

 FG2135F

Ponta cônica topo arredondado indicada para acabamento em regiões de faces livres, como a vestibular ou a lingual, dependendo dos dentes.

 FG3118F

Também conhecida como chama, indicada para acabamento da face palatina ou ajuste oclusal.

 FG3168FF

Também conhecida como ovo, indicada para o acabamento da palatina devido ao formato arredondado.

 FG3195FF

 FG3195F

Indicadas tanto para região cervical como proximais e faces livres, devido ao seu formato.

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:


81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

KIT INVICTA® ACABAMENTO FINO EM RESTAURAÇÕES

 7 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas indicadas para Acabamento das Cavidades e para Confecção de Bisel Cavo-Superficial.



 FG1093F

Para acabamento dos preparos, para restaurações indiretas ou diretas em dentes posteriores, quando indicada.

 FG1112F

Para acabamento tanto do preparo, como de restaurações, assim como ajuste oclusal.

 FG1190F

Por ser mais delicada, está indicada no acabamento da região cervical. também pode ser utilizado em outras faces.

 FG2135F

Acabamento dos preparos mas, também das restaurações em faces livres, como vestibular e lingual de alguns dentes.

 FG3118F

Para acabamento da face palatina e pode ser utilizada no ajuste da oclusão.


 FG3168F

Para acabamento da face palatina, tanto em restaurações como nos preparos.

 FG3195F

Para acabamento de restaurações e preparos, tanto na vestibular como na cervical e nas proximais dos dentes.

KIT INVICTA® ACABAMENTO ULTRAFINO EM RESTAURAÇÕES

 7 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas indicadas para Acabamento e Alisamento das Superfícies e Margens das Restaurações.



 FG1093FF

Para acabamento dos preparos para restaurações indiretas ou diretas em dentes posteriores, quando necessário.

 FG1112FF

Indicada para o acabamento tanto do preparo, como de restaurações, assim como o ajuste da oclusão.

 FG1190FF

Por ser mais delicada, está indicada no acabamento da região cervical mas também pode ser utilizada em outras faces.

 FG2135FF

Pode ser utilizada no acabamento dos preparos e, também das restaurações em faces livres, como vestibular e lingual de alguns dentes.

 FG3118FF

Para acabamento da face palatina, mas também pode ser utilizada em ajuste da oclusão.

 FG3168FF

Para acabamento da face palatina, tanto em restaurações como em preparos.

 FG3195FF

Pode ser utilizada para acabamento de restaurações e preparos, tanto na vestibular como na cervical e nas proximais.

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:


81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

KIT INVICTA® PRÓTESE PARCIAL FIXA

 22 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas necessárias para realizar todos os tipos de Preparos em Prótese Parcial Fixa.



 FG1026

 FG1028

 FG1027

 FG1029

Remoção de restaurações em regiões de difícil acesso.
Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.

 FG2121


Confecção de términos.

 FG2135

Confecção de sulco de orientação vertical.
União dos sulcos de orientação. Confeccionar término cervical.

 FG2200

Rompimento da face proximal dos preparos, quando indicada.

 FG3098

Término e preparo interno de elementos posteriores.

 FG3139

Indireta de dentes posteriores.

 FG3145

 FG3146

Preparo e confecção de términos em facetas.

 FG4141

 FG4142

Indicadas para realização de sulcos de orientação horizontal.

 FG2135F

 FG3113F

Acabamento dos preparos nas faces vestibulares e proximais.

 FG3118F

Preparo e acabamento da face palatina.

 FG3122F

Acabamento de preparo em laminados.

 FG3139F

Acabamento de preparos em indiretas de dentes posteriores.

 FG3168F

Acabamento de preparos da palatina de dentes anteriores. Oclusal dos dentes posteriores.

 FG3113FF

 FG3122FF

Refinamento de preparo em laminados.

 FG3139FF

Refinamento de preparo indiretas em dentes posteriores.

Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

SAIBA MAIS

