

Placas para confecção de moldeiras via vácuo formagem

São placas para moldeiras no formato quadrado (13,5 cm x 13,5 cm) ou redondo (13,5 cm de diâmetro), fabricadas em EVA (copolímero de etileno e acetato de vinila), usadas na confecção de moldeiras via vácuo formagem.

Indicação: Indicada para confecção de moldeiras em plastificadoras a vácuo, para clareamento dental e aplicação de flúor (placas de 1 mm de espessura) ou para confecção de placas para tratamento de bruxismo (2 e 3 mm de espessura).

Composição básica: copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA).

Instruções de uso:

- 1) Moldar a arcada do paciente.
- 2) Preencher o molde com gesso, obtendo o modelo.
- 3) A confecção de alívios na moldeira é opcional.
- 4) Acomodar a placa de EVA na plastificadora a vácuo.
- 5) Posicionar o modelo de gesso centralizado sob a placa e ligar a plastificadora para iniciar o aquecimento da placa.
- 6) Quando a placa apresentar um abaulamento evidenciando seu amolecimento, abaixá-la rapidamente sobre o modelo e ligar o vácuo entre 10 e 15 segundos.
- 7) A placa se ajustará aos contornos do modelo.
- 8) Após resfriamento da moldeira, recorte o excesso de material.

Armazenamento e transporte:

Manter o produto em local seco, na embalagem original.
Não expor ao calor excessivo.

Precauções:

Durante o processo de moldagem as placas podem apresentar-se quentes e provocar queimaduras na pele se tocadas. Evite tocar nas placas durante ou logo após o processo. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada. Não expor o produto ao calor excessivo.

Advertências:

Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Produto de uso único, podendo ser moldado uma única vez. Em caso de anomalia na moldagem descartar o produto. Produto não estéril. Manter o produto fora do alcance de crianças. Produto de uso restrito a profissionais do ramo odontológico (cirurgiões-dentistas e técnicos em próteses dentárias).



villevie

Inovações em Produtos Odontológicos

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ 01.101.363/0001-86
RUA ADVOGADO MIGUEL CERCAL, 645
NOVA BRASÍLIA - JOINVILLE - SC - CEP: 89214-610
Resp. Téc. ALDO CASTELLANI – CRQ-SC 13.400.397 13ªR
Fone: (47) 34542200
Reg. ANVISA: 10344110012
www.villevie.com - fabrica@villevie.com

Validade: 5 anos