

Tipos de Enxertos Ósseos	Alvéolo Pós Extração	GAPS (Implantodontia)	Aumento de Rebordo	Seio Maxilar: Técnica Imediata com 5mm de Osso
GenOx Org	Indicado	Indicado	Não Indicado	Não Indicado
GenOx Inorg	Precaução	Precaução	Indicado	Indicado
GenMix	Indicado	Indicado	Não Indicado	Não indicado
GenPhos XP (Extra Poroso)	Precaução	Precaução	Indicado Grânulos 0,50 a 0,75 mm	Idicado Grânulos 0,75 a 1 mm
OrthoGen	Indicados Grânulos 0,50 a 0,75 mm ou 0,75 a 1,00 mm	Indicados Grânulos 0,25 a 0,50 mm 0,50 a 0,75 mm	Indicados Grânulos 0,50 a 0,75 mm ou 0,75 a 1,00 mm	Indicados Grânulos 0,75 a 1 mm e 1,00 a 2,00 mm

Tipos de Membranas	Preservação Alveolar com 4 ou 5 Paredes	GAP ou Parede Lateral do Seio	Uso Intra Sinusal	Proteção de Implante ou Biomaterial na Vestibular
GenDerm	Sim	Sim	Sim	Sim
GenDerm Flex	Sim	Sim	Precaução	Sim
Pratix	Sim	Sim	Não Indicado	Sim
Techgraft	Sim	Sim	Sim	Sim



Download do
catálogo digital
Acesse o QR Code



Tipos de Enxertos Ósseos	Tempo de Reparação	Composição	Grânulos	Apresentação
GenOx Org	4 a 6 meses	Matriz bovina Orgânica (cortical)	0,50 a 1,0 mm	0,5 cc 1,0 cc
GenOx Inorg	7 a 9 meses	Matriz bovina Inorgânica (hidroxiapatita)	0,50 a 1,0 mm	0,5 cc 1,0 cc
GenMix	4 a 6 meses	33% Genox Inorg + 33% Genox Org + 33% Colágeno	0,25 a 1,0 mm	0,75 cc 1,5 cc
GenPhos	7 a 9 meses	Cerâmica Bifásica (70% hidroxiapatita + 30% -trifosfato de cálcio)	0,50 a 0,75 mm	0,5 cc 1,0 cc
GenPhos XP (Extra Poroso)	7 a 9 meses	Cerâmica Bifásica (70% hidroxiapatita + 30% - trifosfato de cálcio)	0,50 a 0,75 mm 0,75 a 1,0 mm	0,5 cc 1,0 cc 1,5 cc
OrthoGen	6 a 8 meses	Matriz bovina (70% inorgânica + 30% orgânica)	0,25 a 0,50 mm / 0,50 a 0,75 mm / 0,75 a 1,00 mm / 1,0 a 2,0 mm	0,5 cc 1,0 cc 1,5 cc 2,0 cc

Membranas	Tempo de Reabsorção	Composição	Tamanho
GenDerm	45 a 90 dias	Cortical Bovino 150 a 200 µm	20 x 20 mm 30 x 30 mm
GenDerm Flex	60 a 120 dias	Cortical Bovino > 200 µm	20 x 20 mm 30 x 30 mm
Pratix	90 a 120 dias	PLGA (Ácido Polilático Poliglicólico)	15 x 25 mm 30 x 40 mm
Techgraft	120 a 180 dias (4 a 6 meses)	Pericárdio Bovino	20 x 20 mm 20 x 30 mm 30 x 40 mm