

3M

Filtek™

Universal Restorative

Guia Técnico

Aprenda como usar



Guia Técnico

Queremos que você obtenha os melhores resultados usando a 3M™ Filtek™ Universal Restorative em seus procedimentos restauradores.

É por isso criamos este guia técnico interativo. Nele, você encontrará a lista de indicações, guia com ilustrações do passo a passo para os procedimentos comumente realizados e a instrução de uso do produto.

Menu

Indicações 3

Passo a passo

Classe II 4

Classe IV 5

Pink Opaquer 6

Instrução de uso 7

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Indicações

- Restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores (incluindo as superfícies oclusais);
- Núcleos de preenchimento;
- Esplintagem;
- Restaurações indiretas incluindo *inlays*, *onlays* e facetas.



Restaurações Classe II

Profundidade do
Incremento

Equipamentos LEDs
(550-1000 mW/cm²)

Equipamentos LEDs
(1000-2000 mW/cm²)

2 mm

20 s oclusal

10 s oclusal




Prepare o dente e insira a matriz.



Siga as instruções de uso do sistema adesivo escolhido.



Insira a Filtek^{MR} Universal em incrementos de até 2 mm.

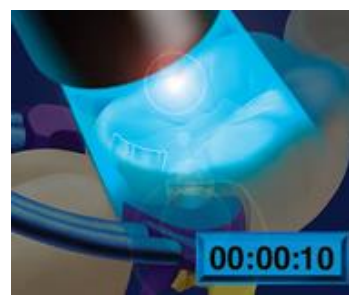

Fotopolimerize de acordo com as instruções de uso.



Utilize um disco para realizar o contorno da restauração (ex: SofLex^{MR} Pop On).



Utilize uma broca (instrumento cortante rotatório) para realizar o contorno da face oclusal.



Realize o ajuste oclusal.



Realize o pré-polimento com um disco adequado (ex: SofLex^{MR} Espiral bege).



Realize o polimento final com um disco apropriado (ex: SofLex^{MR} Espiral rosa).

Restaurações Classe IV

Profundidade do
Incremento

Equipamentos LEDs
(550-1000 mW/cm²)

Equipamentos LEDs
(1000-2000 mW/cm²)

2 mm

20 s oclusal


10 s oclusal




Prepare o dente.



Siga as instruções de uso do sistema adesivo escolhido.

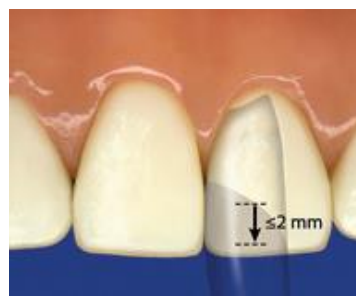


Insira a Filtek^{MR} Universal em incrementos de até 2 mm.

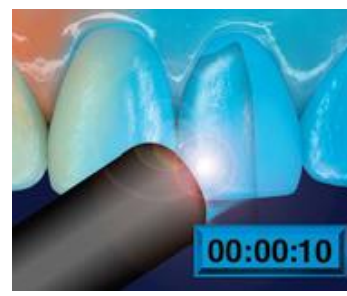

Fotopolimerize de acordo com as instruções de uso .



Utilize discos e tiras de lixa adequados para realizar o contorno da restauração (ex: Sof-Lex^{MR} Pop On e Sof-Lex^{MR} Tiras de Lixa).

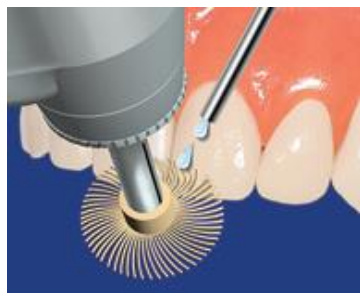

Realize o pré-polimento com um disco adequado (ex: SofLex^{MR} Espiral bege).



Realize o polimento final com um disco adequado (ex: SofLex^{MR} Espiral rosa).

Utilização do Pink Opaquer




Prepare o dente.



Siga as instruções de uso do sistema adesivo escolhido.



Insira a Filtek^{MR} Universal em incrementos de até 2 mm.

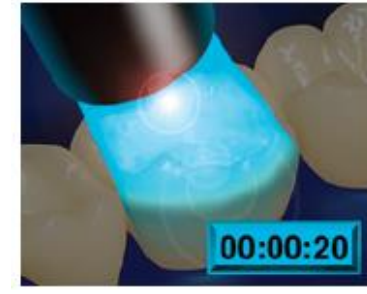

Fotopolimerize de acordo com as instruções de uso .

Profundidade do Incremento	Equipamentos LEDs (550-1000 mW/cm ²)	Equipamentos LEDs (1000-2000 mW/cm ²)
1 mm	40 s oclusal	20 s oclusal

Instruções de uso

Filtek Universal Restorative (Versão A)
– Publicado em dezembro/2019




Filtek Dispensador (versão A)
– Publicado em dezembro/2019




3M Ciência.
Aplicada à vida.™

www.3m.com.br/filtek-universal

ACOMPANHE-NOS:

 /3MORALCAREBRASIL

 /3M.ORALCAREBRASIL

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br
falecoma3M@mmm.com

3M