

ALGINATOS

Material de Moldagem Odontológico

Instruções de Uso

Apresentação:

05730050000 - AVAGEL 20,5g

05730060000 - AVAGEL 410g

Composição

Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenofaleína.

Indicações de Uso

Os componentes da família de ALGINATOS são indicados para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Entretanto, devido às peculiaridades de cada modelo, há técnicas de moldagem que são mais ou menos adequadas a cada modelo, como é mostrado abaixo:

AVAGEL – indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Contraindicações

Os ALGINATOS não devem ser misturados ou usados em conjunto com outros alginatos, pois poderá alterar suas propriedades.

Advertências

Produto pode causar reação alérgica

Precauções

- Para Uso Odontológico
- Contém sílica, a inalação do pó seco pode ser prejudicial à saúde.
- Recomenda-se manipular com máscara de proteção facial.
- Recomenda-se que durante todos os procedimentos clínicos profissional, auxiliares assim como pacientes utilizem óculos de proteção
- As impressões devem ser sempre lavadas e desinfetadas, conforme recomendam a ADA, CDC e o OSHA.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

MÉTODOS PARA ESPATULAR:

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. Cra 19B N° 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitário INVIMA 2021DM-0024394

1100-PIR-DFU 0083 – Rev02

ALGINATOS

Material de Moldagem Odontológico

Instruções de Uso

- Para uma moldagem de uma hemiarcada, utilizar uma medida de pó de 8,5g para uma medida de água de 18mL.
- Espatular o pó e a água até obter uma coloração rósea homogênea. •Inserir a moldeira com Avagel em sua devida posição na boca, comprimindo-a ligeiramente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira imóvel até 1 minuto após o início da presa do material;
- Quando o material tiver retomado à coloração branca, remover e enxaguar com água corrente.
- Para se obterem melhores resultados, recomenda-se verter o gesso imediatamente após a moldagem. Não sendo isso possível, conservar o molde em um umidificador

Cuidados de Conservação

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Uso Único. Proibido Reprocessar.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. Cra 19B N° 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024394

1100-PIR-DFU 0083 – Rev02

ALGINATOS

Material de Moldeo Odontológico

Instrucciones de uso

Presentación:

05730050000 - AVAGEL 20,5g
05730060000 - AVAGEL 410g

Composición

Alginato de Potasio, Sulfato de Calcio, Tetrapirofosfato de Sodio, Fluotitanato de Potasio, Polietilenglicol, Óxido de Magnesio, Diatomita, Aroma, Clorhexidina, Alcohol Anhidro y Fenoltaleína.

Indicaciones de uso

Los componentes de la familia de ALGINATOS son indicados para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Sin embargo, debido a las peculiaridades de cada modelo, hay técnicas de moldeo que son más o menos adecuadas a cada modelo, como se muestra a continuación:

AVAGEL - indicado para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Contra indicaciones

Los ALGINATOS no deben mezclarse o utilizarse junto con otros alginatos, ya que pueden cambiar sus propiedades.

Advertencias

El producto puede causar una reacción alérgica

Precauciones

- Para uso odontológico
- Contiene sílice, la inhalación del polvo seco puede ser perjudicial para la salud.
- Se recomienda manipular con máscara de protección facial.
- Se recomienda que durante todos los procedimientos clínicos profesionales, auxiliares así como pacientes utilicen gafas de protección
- Las impresiones siempre deben lavarse y desinfectarse, según lo recomendado por ADA, CDC y OSHA.

Efectos adversarios

No se aplican.

Instrucciones paso a paso

MÉTODOS PARA ESPATULAR:

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuido por:

Dentsply Finance Co. Cra 19B N° 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024394

1100-PIR-DFU 0083 – Rev02

ALGINATOS

Material de Moldeo Odontológico

Instrucciones de uso

- Para un moldeado de una hemiarcada, utilizar una medida de polvo de 8,5 g para una medida de agua de 18mL.
- Pasar la espátula en el polvo y en la agua para obtener una coloración rósea homogénea. • Insertar la bandeja con Avagel en su posición correcta en la boca, presionando ligeramente.
- Haciendo parches musculares y mantener la bandeja todavía hasta 1 minuto después del inicio de la presa del material;
- Cuando el material se haya reanudado a la coloración blanca, retirar y enjuagar con agua corriente.
- Para obtener mejores resultados, se recomienda verter el yeso inmediatamente después del moldeo. No es posible, conservar el molde en un humidificador.

Cuidados de Conservación

Conservar al abrigo de calor y humedad.

De un solo uso. Reprocesamiento prohibido.

ATENCIÓN: Compruebe la correlación de la versión de estas instrucciones de uso con el producto adquirido indicado en el embalaje.

Para obtener estas instrucciones de uso en formato impreso, solicite nuestro servicio por teléfono 0800 771 2226 (solo Brasil) o por correo electrónico atendimento@dentsplysirona.com

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuido por:

Dentsply Finance Co. Cra 19B N° 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024394

1100-PIR-DFU 0083 – Rev02