

INSTRUÇÕES DE USO:

1




Diluir na proporção de 1 ml de PRATICZYME para cada 1 litro de água (1:1000). A temperatura da água deve estar entre 40 a 55 °C.

2



Aplicar o material a ser limpo na solução deixando agir com tempo de contato de 5 minutos.

3

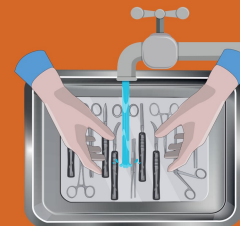

Enxaguar abundantemente com água de boa procedência.



PRATICZYME

Detergente enzimático neutro para lavagem manual. Possui em sua formulação 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carbohidrase) e um poderoso tensoativo não-iônico, de alta performance, que auxilia na remoção de matéria orgânica, garantindo um processo de esterilização ou desinfecção química mais eficaz.

INDICAÇÃO

Para uso em endoscópios, colonoscópios, broncoscópios, fibroscópios, canulados e etc.

PREPARO DA SOLUÇÃO

Diluir 1ml de PRATICZYME para 1 litro de água. A temperatura de água deve estar entre 40 a 55 °C. Para limpeza em temperatura ambiente, faça a mesma diluição, dilua 1 ml de PRATICZYME para cada 1 litro de água. O tempo de imersão do produto com o material deverá ser validado conforme protocolo interno na instituição para garantir maior eficácia do produto.

Recomendações sobre a água utilizada para a diluição:

- Água potável, desmineralizada ou deionizada;
- Dureza: 0 a 355 ppm;
- Condutibilidade: 0,0000050 a 200 µs/cm.

"UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA".

O processo de limpeza deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou de acordo com protocolos existentes.

LAUDOS VALIDADOS

| ANÁLISE | METODOLOGIA |
|------------------------------------|-----------------|
| pH puro e diluição de uso | POP-M 2111 |
| Atividade proteolítica | RDC 55/2012 |
| Atividade amilolítica | RDC 55/2012 |
| Challenge Test | GSOP 22 |
| Estabilidade acelerada | RDC 55/2012 |
| Biodegradabilidade Imediata | OECD 301 (1997) |
| Irritação/Corrosão Cutânea Puro | OECD 404 (2015) |
| Irritação/Corrosão Cutânea Diluído | OECD 404 (2015) |
| Irritação/Corrosão Ocular Puro | OECD 405 (2017) |
| Irritação/Corrosão Ocular Diluído | OECD 405 (2017) |

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.
Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648-8029.001-9. - Embalagem 1 litro.
Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648-8029.002-7. - Embalagem 5 litros.