

- **MODELOS:**

| Nº | Diâmetro Externo | Comprimento |
|----|------------------|-------------|
| 4 | 1,35mm | 40cm |
| 6 | 2,0mm | 40cm |
| 8 | 2,7mm | 40cm |
| 10 | 3,3mm | 40cm |
| 12 | 4,0mm | 40cm |

- **FINALIDADE:** Utilizada para administração de dieta enteral em pacientes que não conseguem se alimentar.

- **ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:** Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, transparente e flexível. É formada por um tubo e um conector. Para a sua descrição consideramos a ponta da sonda que penetra no paciente como proximal e a ponta que possui conector como distal

TUBO: apresenta-se fechado na extremidade proximal e dois furos em paredes opostas elaboradas para não ferir a mucosa. CONECTOR: Componente que permite a ligação do tubo a uma bomba de nutrição enteral. A conexão é do tipo luer fêmea. O comprimento é de 40 cm e os diâmetros variam de 4 a 12. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e apresenta esterilização á gás óxido de etileno, e a embalagem plástica para a esterilização a raio gama.

- **INSTRUÇÕES DE USO:**

- Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto;
- Calçar luvas descartáveis estéreis;
- O paciente deve estar em uma posição deitada ou semi-deitada. A cabeça deve ficar inclinada para trás, porém o pescoço deve estar posicionado para frente;
- Umedecer a sonda com lubrificante estéril e introduzir através de uma narina, á medida que a mesma penetrar na nasofaringe, solicitar ao paciente que exteriorize a língua, com a outra mão segurar a língua com uma gaze e tracionar. Quando o paciente inspirar, introduzir rapidamente no esôfago.
- A sonda deve deslizar rapidamente no esôfago sem oferecer nenhuma resistência. Se entrar equivocadamente na traqueia o paciente engasga e regurgita a ponta proximal da sonda através da boca. Caso isso ocorra retirar a sonda e repetir o procedimento.
- Quando a sonda esta no esôfago consegue se movimentar a mesma facilmente. Com a sonda posicionada iniciar a alimentação enteral.
- Ao final do procedimento retirar a sonda de modo delicado.

- **PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:** Produto médico hospitalar de uso único; Proibido reprocessar; Destruir após o uso e descartar em local próprio para materiais contaminados; Produto estéril a óxido de etileno em embalagem de papel grau cirúrgico ou a raio gama em embalagem plástica; O produto somente poderá ser instalado por profissional habilitado; Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com o prazo de validade vencido; Armazenar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo da luz. O produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

-

- **ARMAZENAMENTO:** armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação

-

- **TRANSPORTE:** transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.