

Conteúdo:

Frasco com 10mL.

Indicação:

Solvente de Gutta-Percha.

Descrição do produto:

O Óleo de Laranja MAQUIRA é um óleo essencial extraído da casca da laranja doce, sendo volátil e com odor agradável. Tem capacidade de dissolver a gutta-percha, cimento de óxido de zinco e eugenol, com ou sem associação. É biocompatível, não apresenta efeitos deletérios à saúde, pouco solúvel em água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas.

Composição:

Óleo Essencial de Laranja.

Modo de Uso:

1. Iniciar o processo da remoção da restauração pelo método mecânico.
2. Aplicar 1-2 gotas do Óleo de Laranja sobre o canal radicular e deixar agir por 5-10 minutos.
3. Introduzir os instrumentos até o forame apical e remover todo o material obturador do interior do canal.
4. Após a completa remoção, utilizar uma solução tensoativa para promover uma limpeza eficaz.

Precauções:

1. Produto de uso exclusivamente profissional.
2. Em caso de entrar em contato com a mucosa oral, uma leve irritação poderá ocorrer no local. Remover com algodão e lavar com água.
3. Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
4. Manter fora do alcance de crianças.
5. Contra-indicado para pessoas sensíveis ao óleo de laranja.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar hermeticamente fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Contenido:

Frasco con 10mL.

Indicación:

Solvente de Gutapercha.

Descripción del producto:

El Aceite de Naranja MAQUIRA es un aceite esencial extraído de la cáscara de la naranja dulce, siendo volátil y con olor agradable. Tiene capacidad de disolver la gutapercha, cemento de óxido de cinc y eugenol, con o sin asociación. Es biocompatible, no presenta efectos deleterios a la salud, poco soluble en agua, sin embargo fácilmente removido del interior del canal por sustancias tensoactivas.

Composición:

Aceite Esencial de Naranja.

Modo de Uso:

1. Inicie el proceso de la remoción de la restauración por el método mecánico.
2. Aplique 1-2 gotas del Aceite de Naranja sobre el canal radicular y deje actuar por 5-10 minutos.
3. Introduzca los instrumentos hasta el foramen apical y remueva todo el material obturador del interior del canal.
4. Después de la completa remoción, utilice una solución tensoactiva para promover una limpieza eficaz.

Precauciones:

1. Producto de uso exclusivamente profesional.
2. En caso de entrar en contacto con la mucosa oral, una leve irritación podrá ocurrir en el local. Remueva con algodón y lave con agua.
3. No utilice el producto con el plazo de validez vencido.
4. Mantener fuera del alcance de niños.
5. Contra-indicado para personas sensibles al aceite de naranja.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacene herméticamente cerrado en local limpio, seco y al abrigo de la luz.