

# MASSAGEADOR

Orbital



 **dellamed**  
Beauty

## 1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir seu Massageador Orbital.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

### CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

### DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço Matriz: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Endereço Centro de Distribuição: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 Itajaí – SC

## 2. SOBRE O MASSAGEADOR CORPORAL

O Massageador Orbital Dellamed auxilia você a aliviar o estresse, reduzindo as dores musculares e proporcionando relaxamento em seu corpo. Além destes benefícios, o Massageador Orbital auxilia a tonificar seus músculos, contribuindo para a redução de medidas.

*Aviso: Leia o manual com atenção antes de usar o aparelho.*

### 3. ACESSÓRIOS



- 1. Ponteira com 9 Esferas:** As 9 esferas são ideais para massagens localizadas.
- 2. Ponteira Lisa:** Ideal para massagens lisas e relaxantes, em lugares como a nuca, ombros e pescoço. Auxilia no alívio das tensões diárias e a sensação de estresse.
- 3. Ponteira Ondulada:** Ajuda a obter massagens mais vigorosas, ideal para massagear coxas, bumbum e culotes, auxiliar na redução de medidas.
- 4. Ponteira de Lixa:** Ideal para calosidades, pés, cotovelo e calcanhares.
- 5. Tela Preta:** Ideal para quem tem cabelo comprido, serve para proteger o cabelo do massagador.

### 4. MODO DE USAR

1. escolha a ponteira desejada, encaixe-a, girando a ponteira até travá-la;
2. Se o aparelho for utilizado próximo a cabelos, utilize a tela preta de proteção;
3. Conecte o plugue de alimentação na tomada para ligar o aparelho;
4. Comece usando o aparelho na intensidade mais fraca e, quando se sentir confortável, gire o botão para aumentar a intensidade. Para desligar, volte o botão para a posição inicial;
5. Após usar, desligue o aparelho e desconecte o plugue de alimentação da tomada.

### 5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para limpeza e manutenção do aparelho, utilize um pano limpo com detergente neutro. Não use detergentes corrosivos;

- Não use o massageador em áreas de muita umidade como banheiras, a fim de evitar choques elétricos e curto-circuito;
- Evite fortes colisões na máquina do aparelho, para prevenir falhas e mal funcionamento;
- Mantenha a uma distância adequada de outros aparelhos eletrônicos, para evitar interferências.

**AVISO: Recomenda-se utilizar por, no máximo, 15 minutos contínuos. Após este período, mantenha-o desligado em um intervalo de pelo menos 30 minutos.**

## 6. CUIDADOS

- Não use o aparelho se estiver grávida, com algum problema cardíaco ou quaisquer lesões físicas;
- Não plugue o massageador em tomada com voltagem acima de 110v e 220v;
- Não use em áreas de muita umidade como banheiras, a fim de evitar choques elétricos e curto-circuitos;

**ATENÇÃO: Não use o massageador orbital em peles inchadas, machucadas, inflamadas ou em partes sensíveis do corpo, como olhos e rosto. Em caso de dúvida, consulte um médico antes de realizar o uso. Deixe-o sempre fora do alcance de crianças;**

## 7. DADOS TÉCNICOS

Voltagem	127v ou 220v (verifique o modelo adequado e a sua tensão de uso)
Potência	25 w
Frequência	60 hz
Dimensões	11 x 25 x 17,5 cm
Peso Líquido	780 g

## 8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

### 1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 90 (noventa) dias para todos os seus componentes. Findando este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual de:
  - 9 (nove) meses para o massageador - totalizando 1 (um) ano de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

### 2 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

### 3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;
- e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

- g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

